

Interton Presto

Um futuro auditivo mais brilhante

Sintoniza a vida em qualquer lugar
com aparelhos feitos para
Auracast™



Ouvir no ruído é o principal desafio para pessoas com perda auditiva.



Escutar conversas no ruido é o motivo principal para comprar novos aparelhos¹

86%

Dos usuários de aparelhos auditivos têm problemas em escutar conversas em um ambiente ruidoso, como um restaurante²

80%

Dos usuários de aparelhos auditivos têm problemas para acompanhar conversas quando mais de duas pessoas estão a falar²

A discrição e estilo importam



A discrição, o tamanho, a aparência e o ajuste dos ouvidos classificam-se entre os 3 primeiros quando são exploradas as opções de aparelhos auditivos¹

30%

Dos usuários consideram a discrição como o aspetto preceptivo mais importante²



“Aparelhos auditivos invisíveis” é a combinação mais buscada na internet por pessoas que procuram soluções³

1. MarkeTrak 2022 & GN Hearing Customs / ITE Quantitative study, 2020

2. Discreetness perceptions, Fidelity for Palladium, 2021 GNH global qualitative & quantitative study

3. Google





Interton GN

Conforto, facilidade de uso e aceitação espontânea são as coisas mais importantes.



O conforto é classificado como o aspecto físico mais importante em todo o processo de compra¹



Soluções fáceis de usar e fáceis de esquecer são priorizadas em detrimento da excelente qualidade de som²



O benefício imediato do som percebido, a clareza dos sons e a capacidade de localizar sons determinam a seleção de aparelhos auditivos³

1. Discreetness perceptions, Fidelity for Palladium, 2021 GNH global qualitative & quantitative study

2. MarkeTrak 22


3. GN Hearing Customs / ITE Quantitative study, 2020



**Nova família,
nova experiência de som,
novos projetos,
nova conectividade,
nova experiência de adaptação**



Uma nova experiencia de som

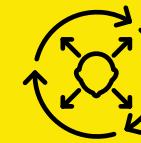

A melhor localização e espacialidade com direccionalidade total




Melhor classificação para ouvir em ambientes barulhentos com o novo modo Ultra Focus



O classificador ambiental mais preciso da indústria



Melhore a experiência de som completa com a nova opção de auricular M&RIE

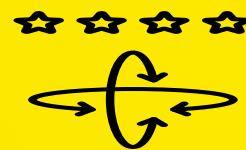


Direccionalidade de acesso total

A melhor maneira de localização ambiente do mercado




Melhor deteção,
seleção e adaptação
aos ambientes

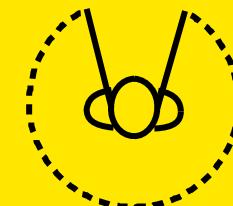


Formação de feixe mais
precisa para melhor clareza
de voz em qualquer
ambiente




Omnidirecional

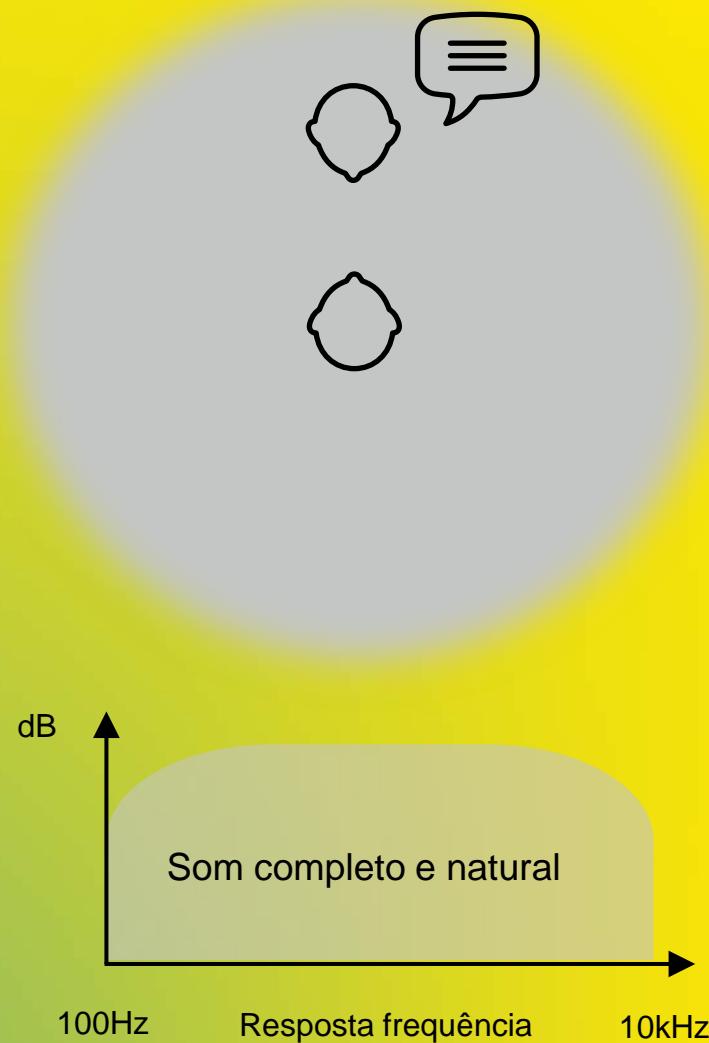

Direcional

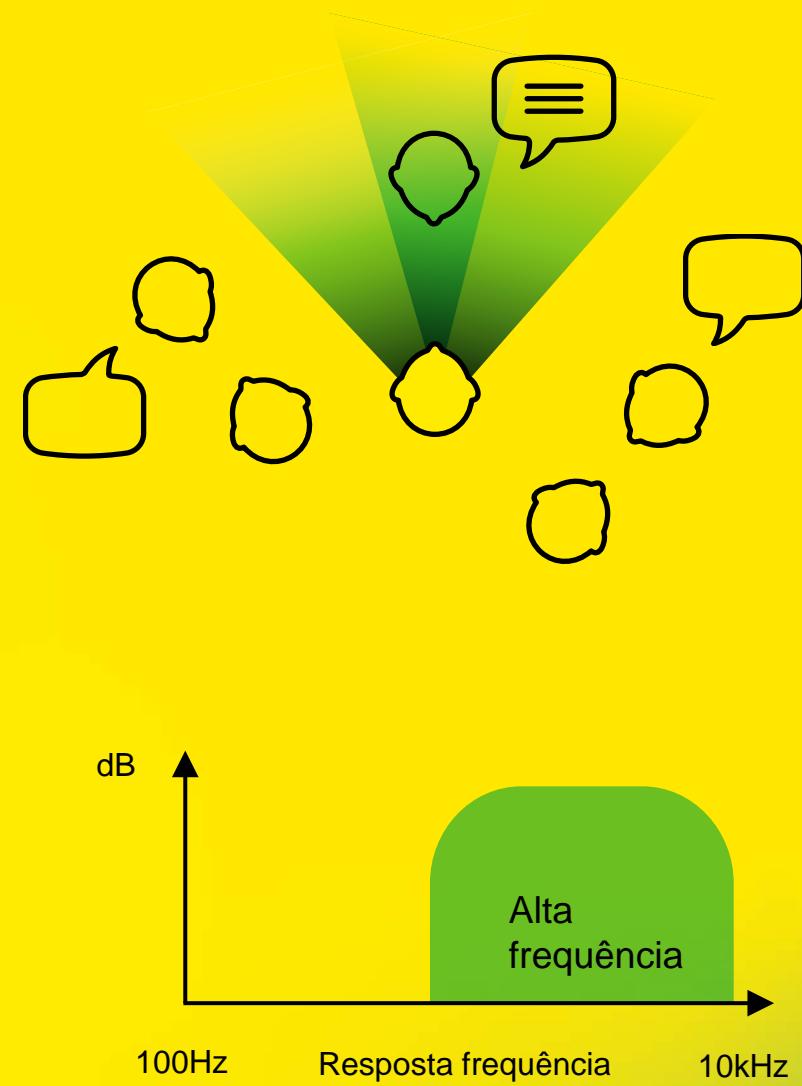


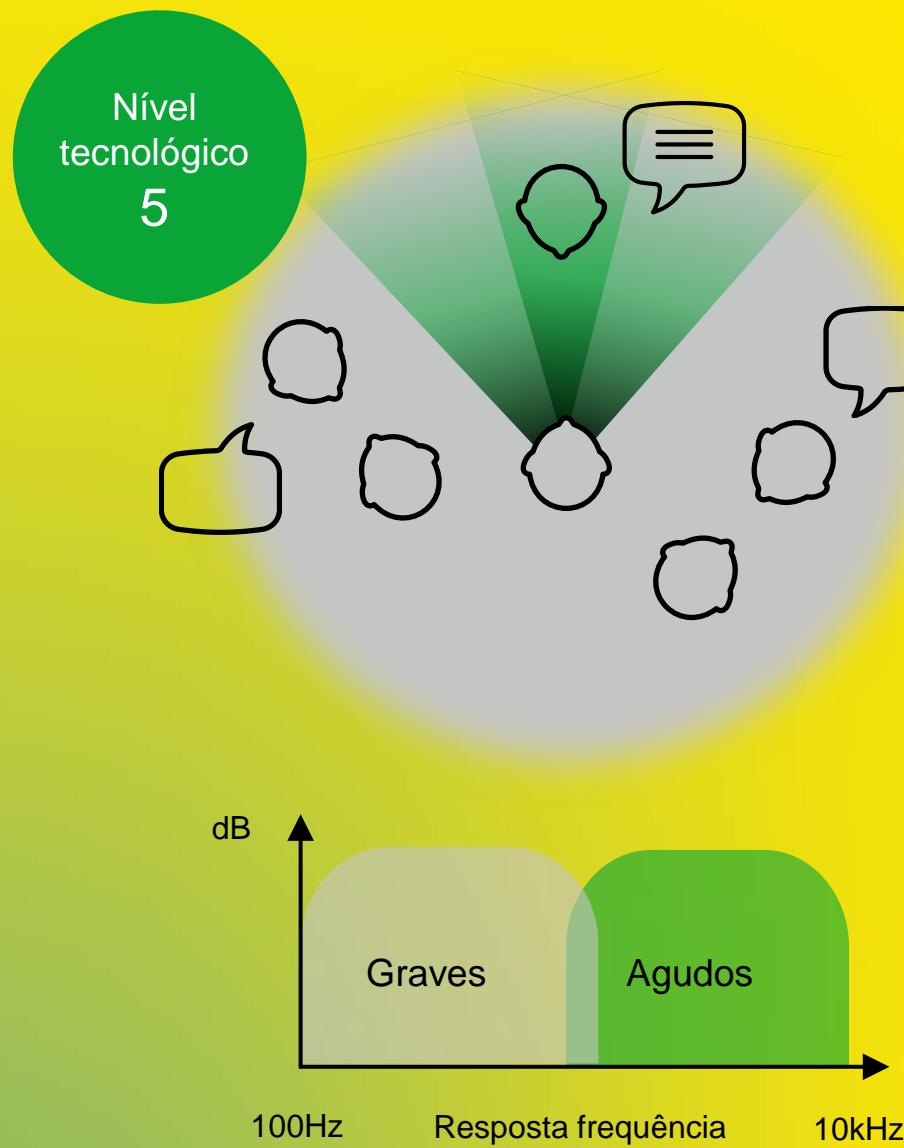

Projetado para percepção natural da voz,
mesmo com ruído de fundo



Preserva a percepção natural da
própria voz sem processamento
adicional

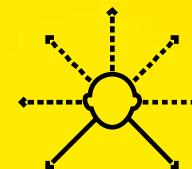


Mantém a consciência espacial..
Escutar outras conversas e
detalhes em todas as direções.



Formador de focos direcionais


Interton GN

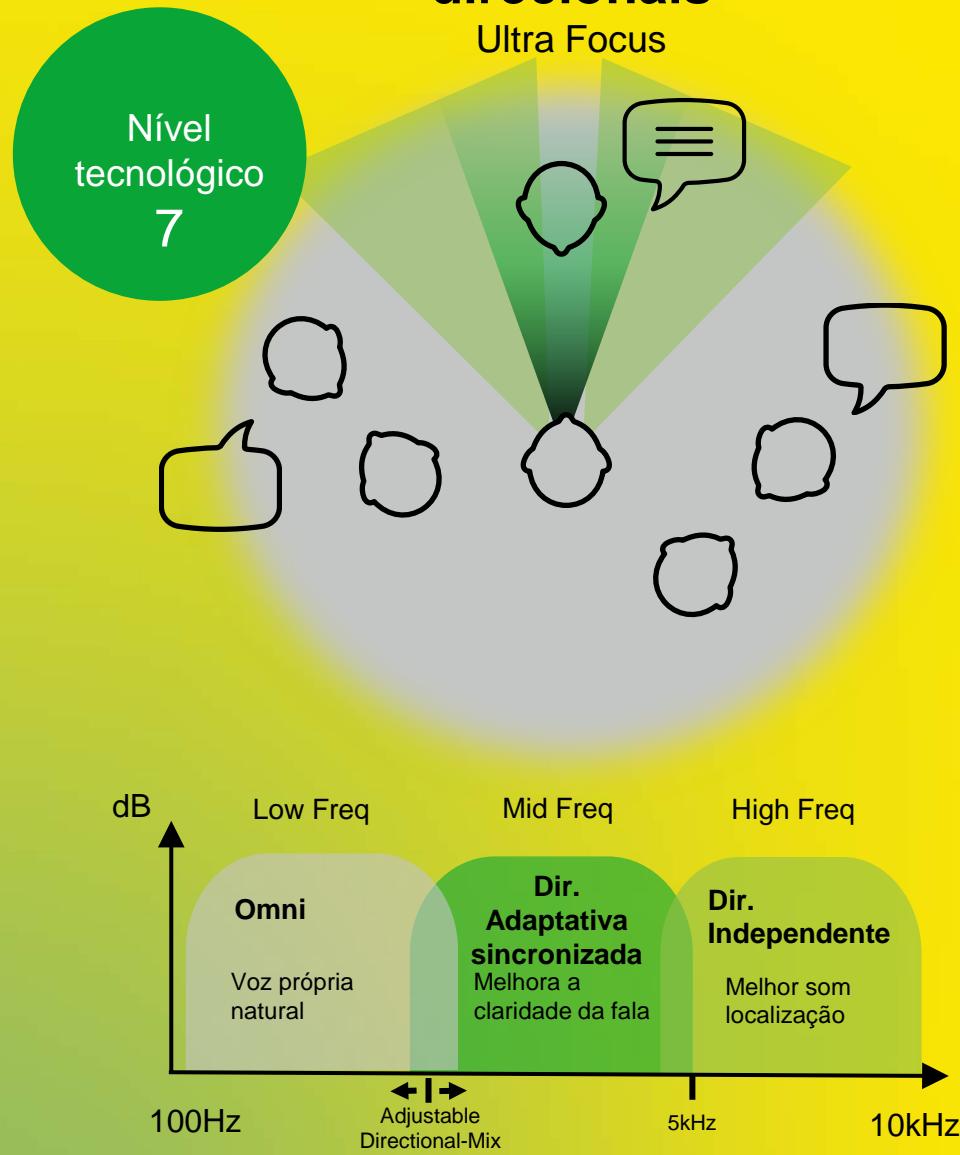

Projetado para percepção natural da voz, mesmo com ruído de fundo



Preserva a percepção natural da própria voz sem processamento adicional

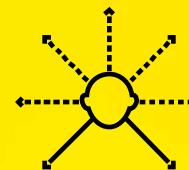


Mantém a consciência espacial..
Escutar outras conversas e detalhes em todas as direções



Melhora a audição 1:1 em ambientes mais difíceis



Competidor A

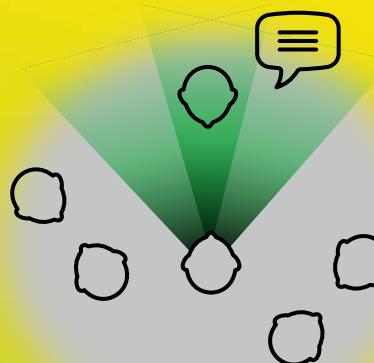


Combina a direccionalidade independente tradicional com o processamento omnidirecional.
Desempenho limitado em ruído.




Competidor B




Aplica a formação de feixes a altas frequências para melhorar a claridade da fala, mas o som é pouco natural e o usuário sente-se isolado do entorno.

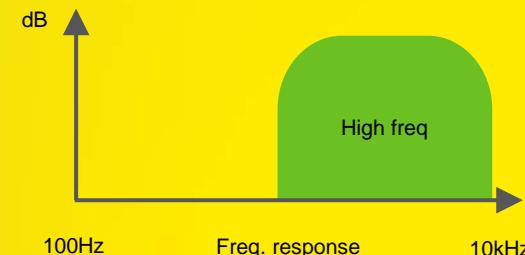

Interton Ultra Focus

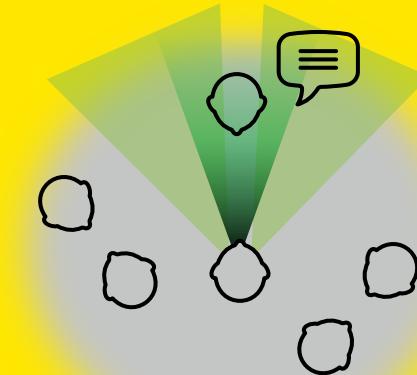

Único formador de padrões direcionais na indústria para melhorar a audição em situações de ruído sem sentir-se isolado.

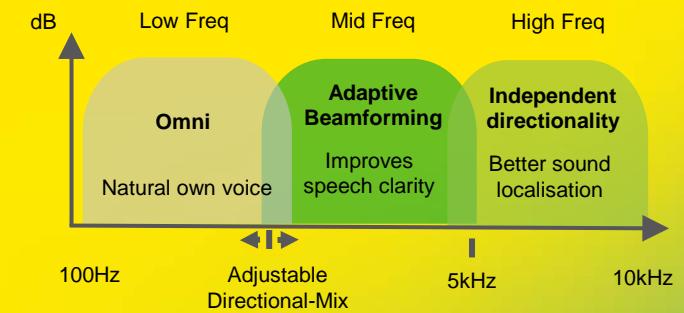





Ultra Focus

Interton GN

Foco mais nítido em sons frontais

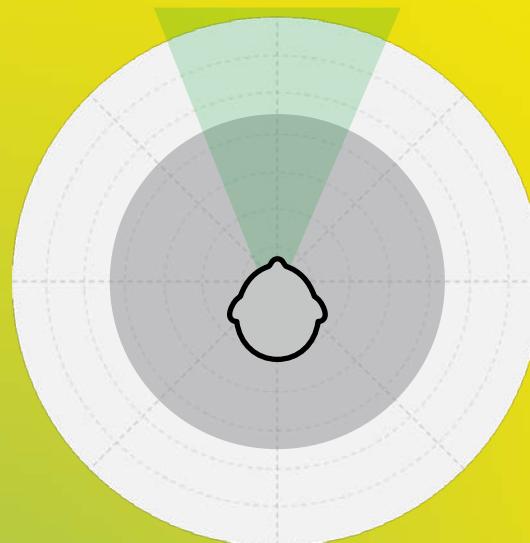


Interton Move
Com direccionalidade
Integrada

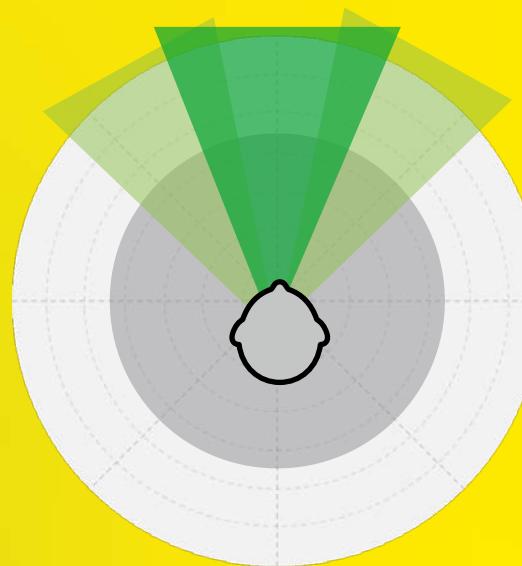

Interton Presto
com Ultra Focus

Até +6 dB de beneficio mais direcional entre 500 Hz y 4 kHz, dependendo do ambiente

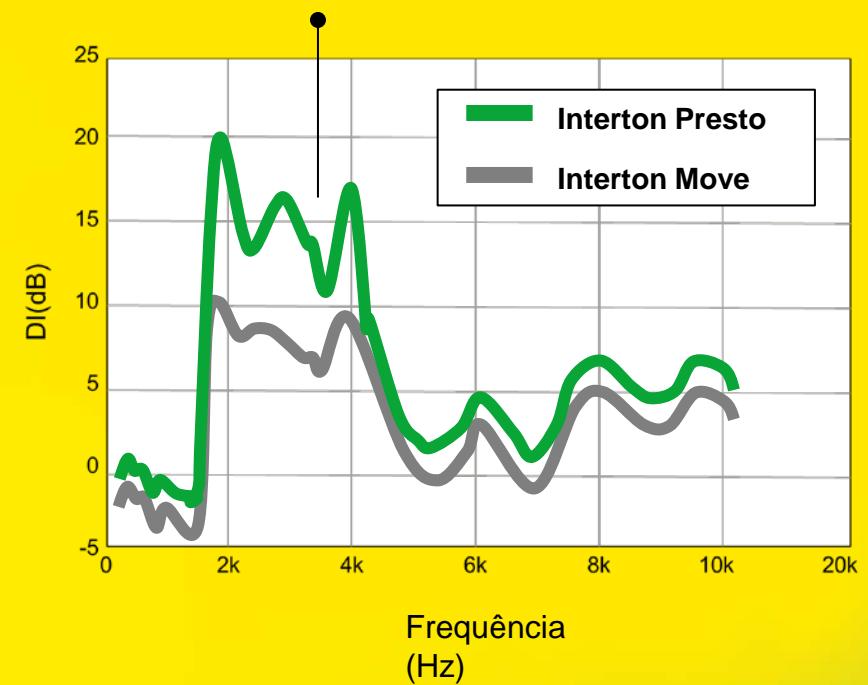



Uma melhoria quase inacreditável na compreensão da fala



15
Usuários experimentados

Perdas de leves a
moderadas







Uma melhoria quase inacreditável na compreensão da fala*



Omnidirecional

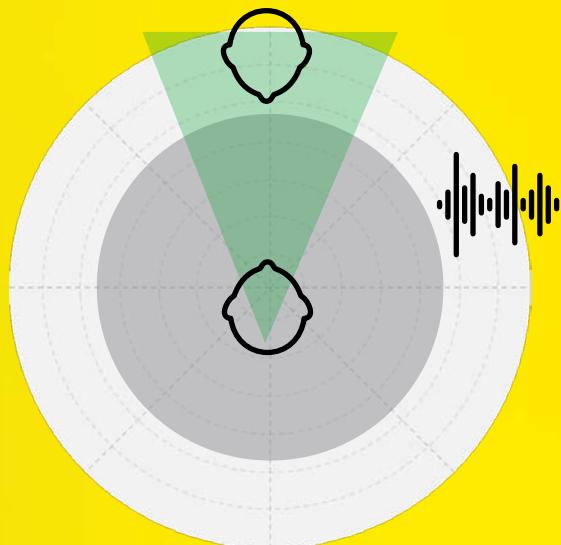

Interton Move
com direccionalidade integrada

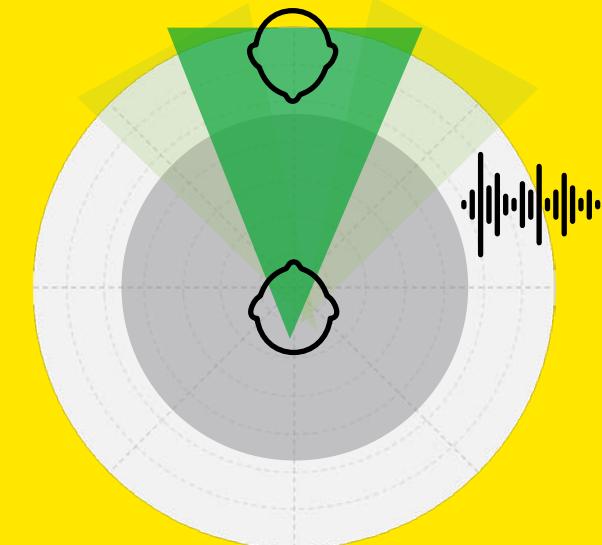



Interton Presto
com Ultra Focus

+8.6dB SNR
Melhor que omni



Ultra Focus


O formador direcional mais estreito da indústria industrial*

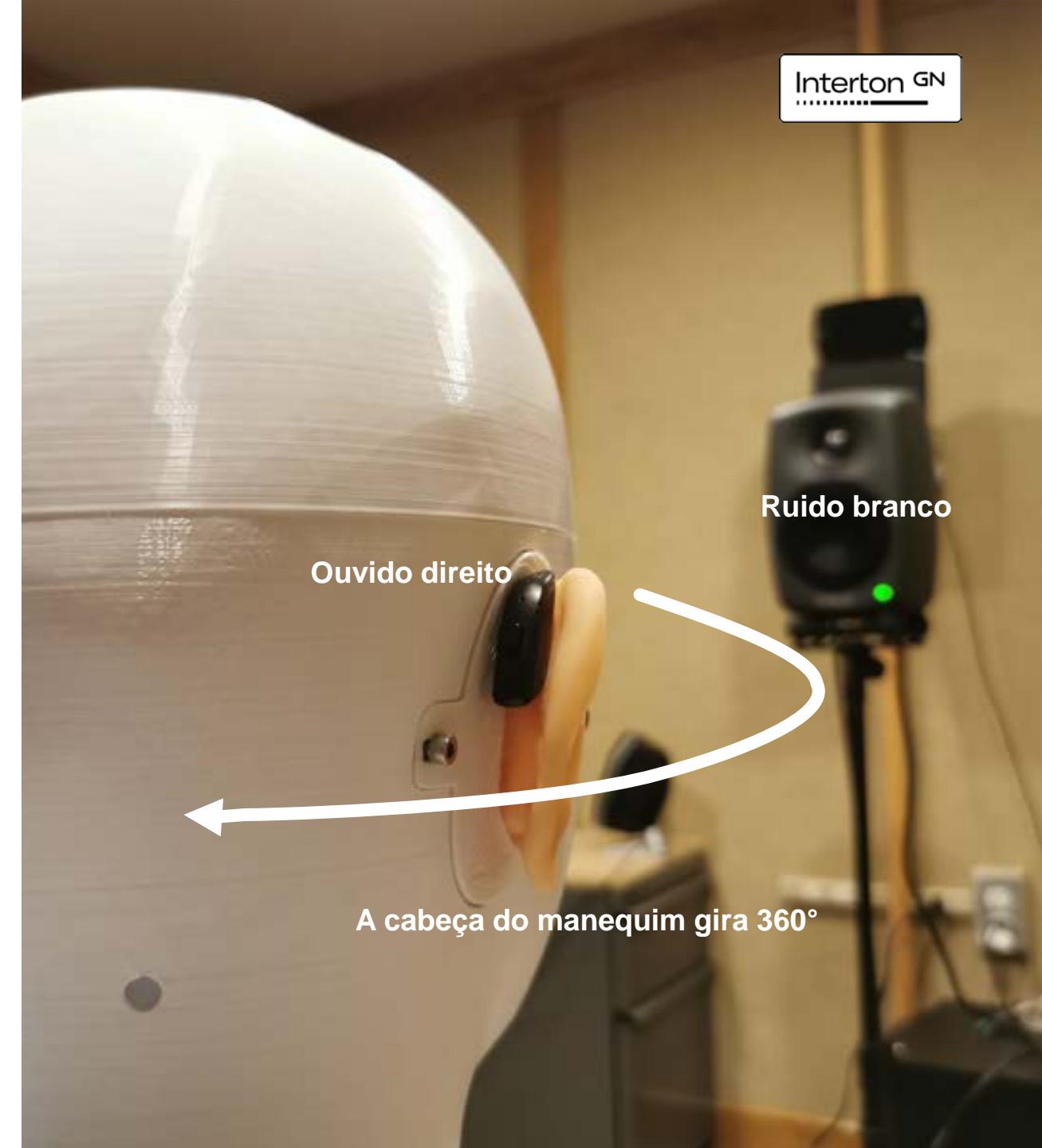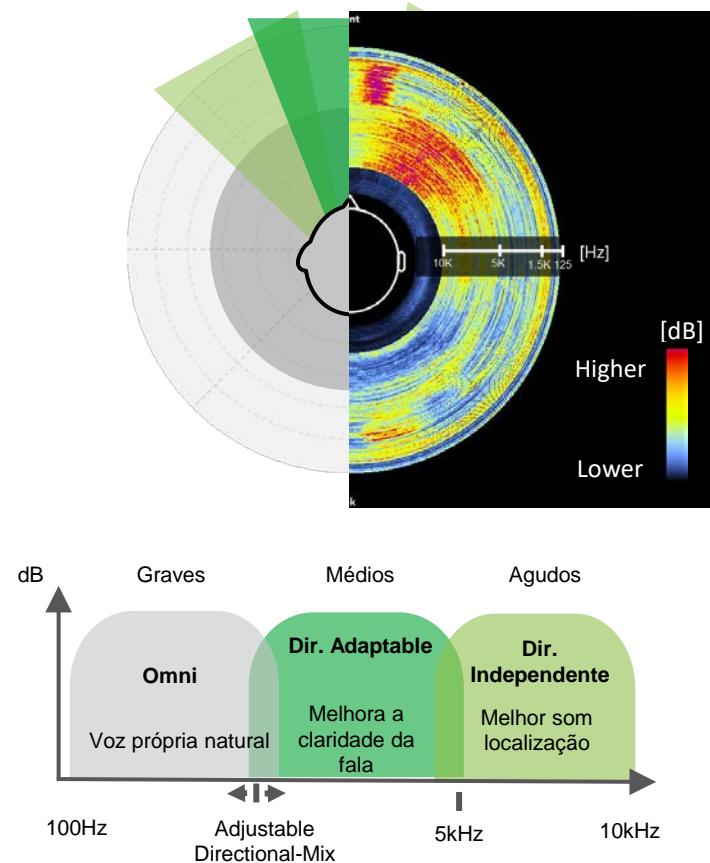




O classificador ambiental mais preciso do mercado*

Precisão da identificação de voz
em ambientes ruidosos

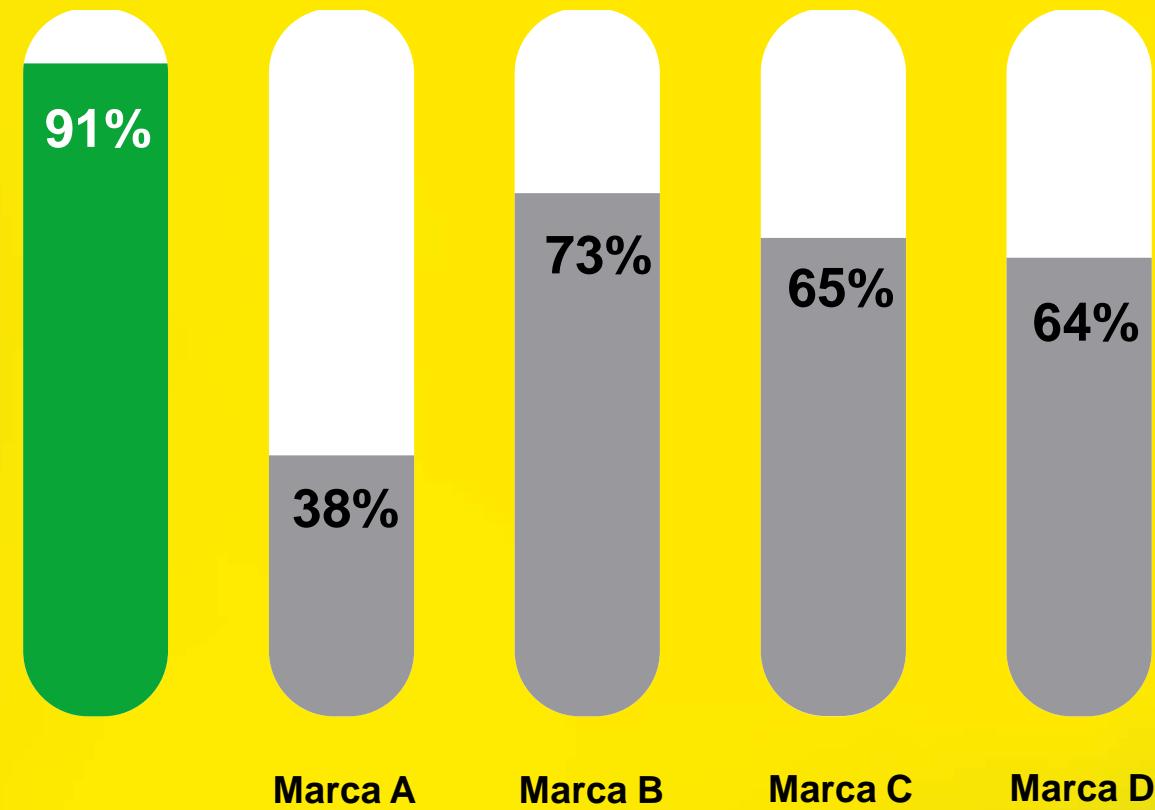




Auricular M&RIE

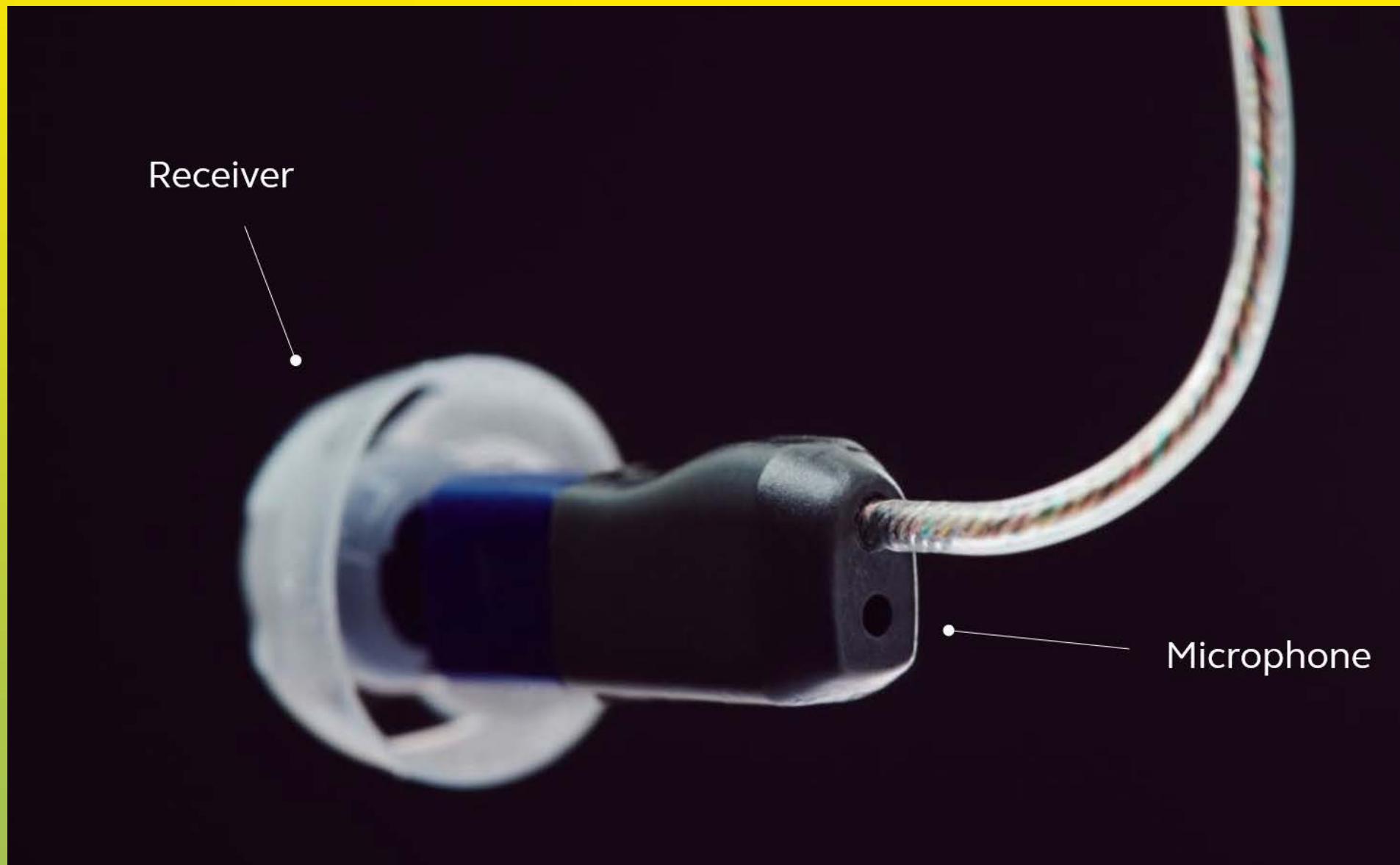



Melhore a experiência sonora completa com M&RIE

Benefícios confirmados pelos Laboratórios Nacionais de Acústica (NAL)

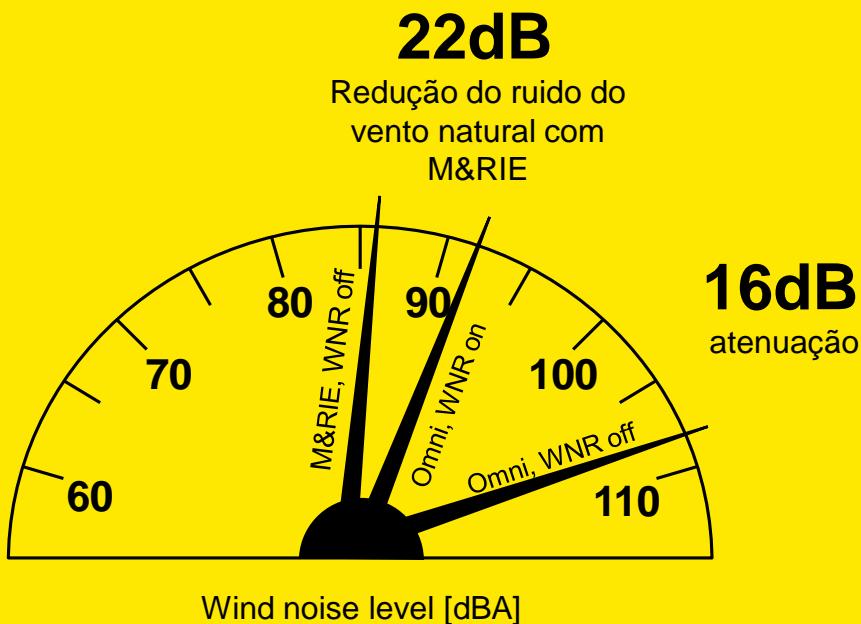

M&RIE Reduz o ruído do vento de forma natural**

- **80%** Dos ouvintes localizaram melhor o som*
- **80%** Dos ouvintes preferiram M&RIE em ruído de fundo*
- **90%** Dos ouvintes experimentaram menos esforço na escuta*



O que é a surdez unilateral (SSD)?

SSD é a perda significativa ou total de audição de um ouvido

Principais consequências



Dificuldade para ouvir a fala do lado incapacitado.



Má localização do som



Dificuldades significativas para entender a fala com ruído



Fatiga auditiva



Interton GN

Apoiar à surdez unilateral

Com estilos RIE y BTE

Interton Presto microRIE CROS



IP160S-DRWC



funciona com estilos Interton Presto RIE

Interton Presto BTE CROS



IP177-DWC



funciona com los estilos Interton Presto BTE



16h

Vida útil da bateria
quando
transmitindo áudio
para o ouvido
oposto

GN proprietary data on file

Sente-se natural

Interton GN

Apresentamos una nova experiencia de projeto



Uma **nova família** completa de estilos projetados para comodidade de uso



Nosso **novo formato** recarregável mais pequeno com el microRIE



Nosso **novo ITE** recarregável, um dispositivo similar a um alta voz



Nosso **novo ITC de pilha 312**



Bateria para todo o dia com uma recarga curta



Com uma nova família completa de aparelhos auditivos que estão preparados para o futuro



**Interton Presto
microRIE.
Nosso formato mais
pequeno**



Interton Presto microRIE



microRIE
IP960S-DWRC
IP760S-DWRC
IP560S-DRWC
IP460S-DWRC

microRIE
IP160S-DWRC
CROS

- O MicroRIE recarregável **mais pequeno** do mercado
- **Nova** tecnologia revolucionaria para ouvir em ambientes ruidosos¹
- **Novo** TapControl para responder chamadas telefónicas*
- Feito para áudio Bluetooth® de baixa energia (LE) e áudio de transmissão Auracast™
- **NUEVO** Wireless CROS/BiCROS

*TapControl funciona com chamadas em alta voz para iPhone e iPad. As chamadas em alta voz são compatíveis com o iPhone 11 ou posterior, o iPad Pro de 12,9 polegadas (5.ª geração), o iPad Pro de 11 polegadas (3.ª geração), o iPad Air (4.ª geração), el iPad mini (6.ª geração), el iPad (10.ª geração) ou posterior, com atualizações de software iOS 15.3 y iPadOS 15.3 o posterior.

¹ Melhora de la SNR de 4,36 dB em comparação com os productos próximos. Jespersen et al. (2024)

Carregador de escritório



Carregador premium

- Bateria integrada a bordo
- Funciona como estojo de transporte
- Proporciona até 3 cargas em qualquer lugar
- Indicador LED de estado da bateria



Carregador de escritório

- Carrega enquanto está conectado ao cabo de alimentação
- Design elegante y atemporal

Interton Presto RIE

- **Nova** tecnologia revolucionaria para ouvir em ambientes ruidosos¹
- Feito para áudio Bluetooth® de baixa energia (LE) e áudio de transmissão Auracast™



RIE

IP961-DWR	IP962-DRW
IP761-DWR	IP762-DRW
IP561-DRW	IP762-DRW
IP461-DWR	IP462-DRW

*TapControl works with hands-free calls for iPhone and iPad. Hands-free calls are compatible with iPhone 11 or later, iPad Pro 12.9-inch (5th generation), iPad Pro 11-inch (3rd generation), iPad Air (4th generation), iPad mini (6th generation), iPad (10th generation) or later, with software updates iOS 15.3 and iPadOS 15.3 or later.

¹ 4.36 dB SNR improvement compared to legacy products. Jespersen et al. (2024)



Novos auriculares SureFit 3 com deteção automática de auricular




- ✓ Adaptações mais fáceis e rápidas
- ✓ Poupa tempo para que se possa concentrar na assessoria
- ✓ Sem mais erros humanos ao selecionar os auriculares






Interton GN

Auriculares SureFit 3

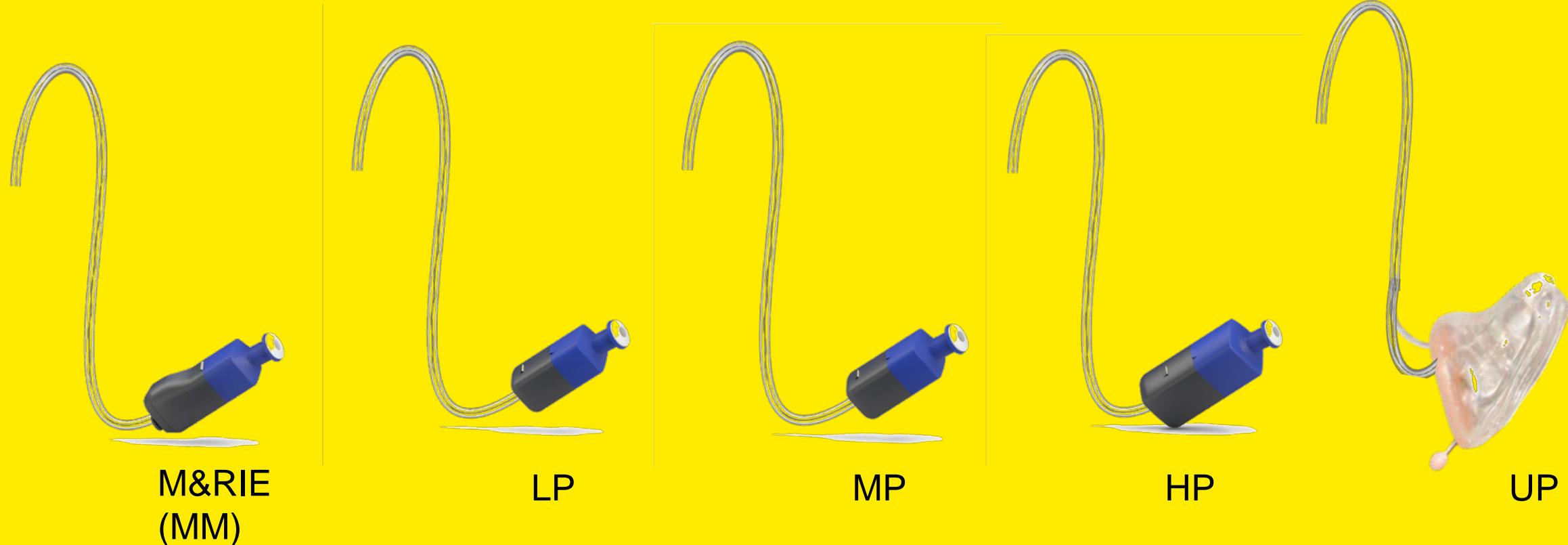



Gamas de adaptação SF3

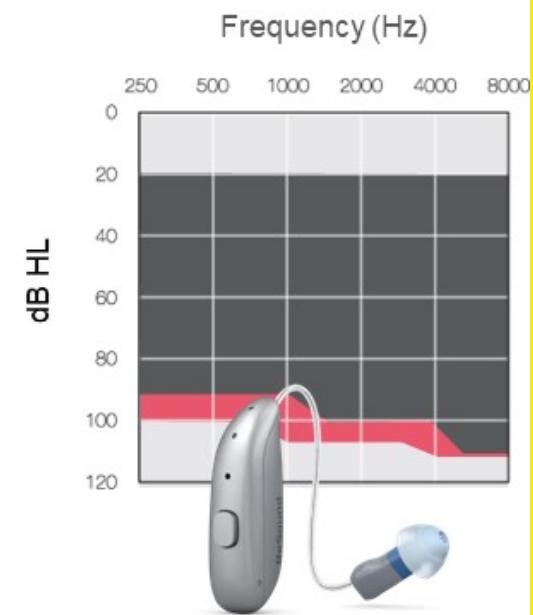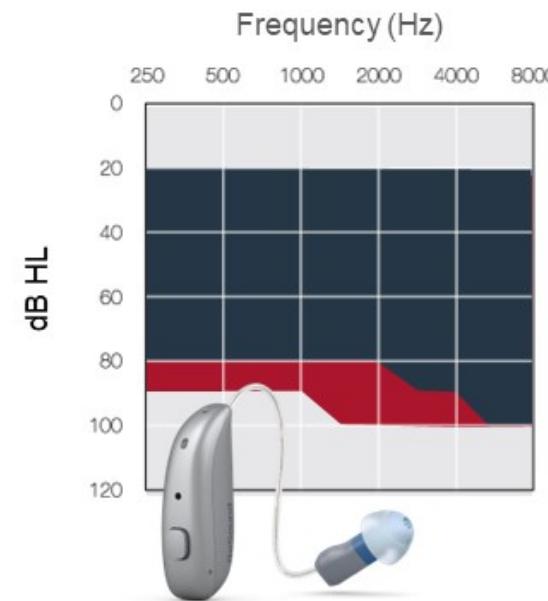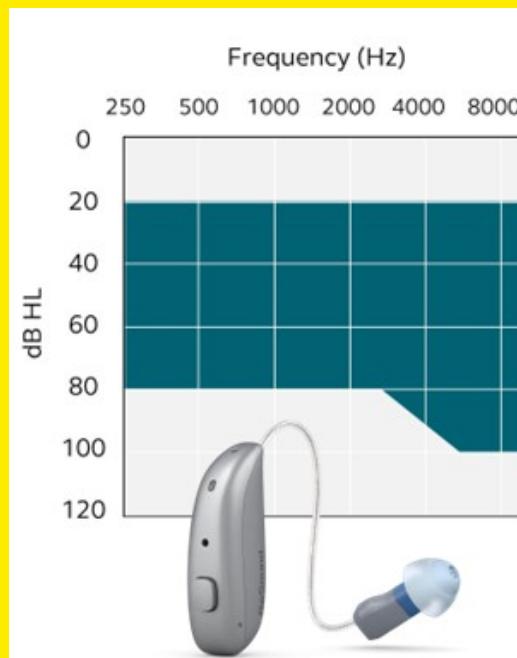

Opções de cores





Interton GN

Formatos BTE



IP977-DWC

IP777-DWC

IP577-DWC

IP477-DWC

IP177-DWC CROS

BTE Recarregável

IP988-DWC


IP788-DWC

IP588-DWC

IP488-DWC

BTE-P Recarregável


Gamas de adaptação

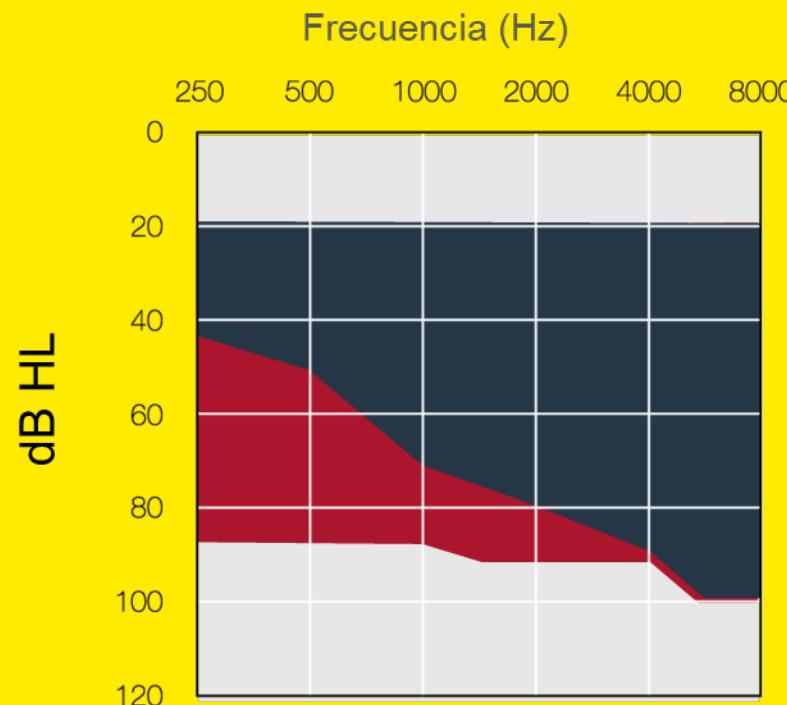

IP977-DWC
IP777-DWC
IP577-DWC
IP477-DWC

Aberto

Fechado

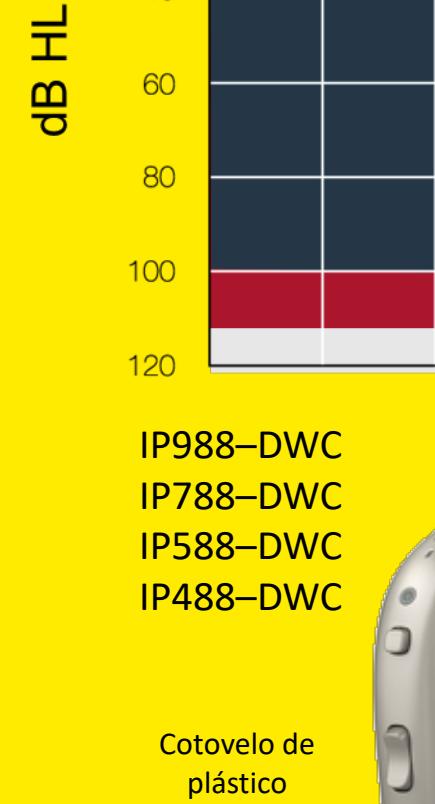

IP988-DWC
IP788-DWC
IP588-DWC
IP488-DWC

Cotovelo de plástico



Cotovelo de metal





Carregador de escritório

Carregadores diferentes para BTE e PBTE

Interton GN


BTE



PBTE








Interton GN

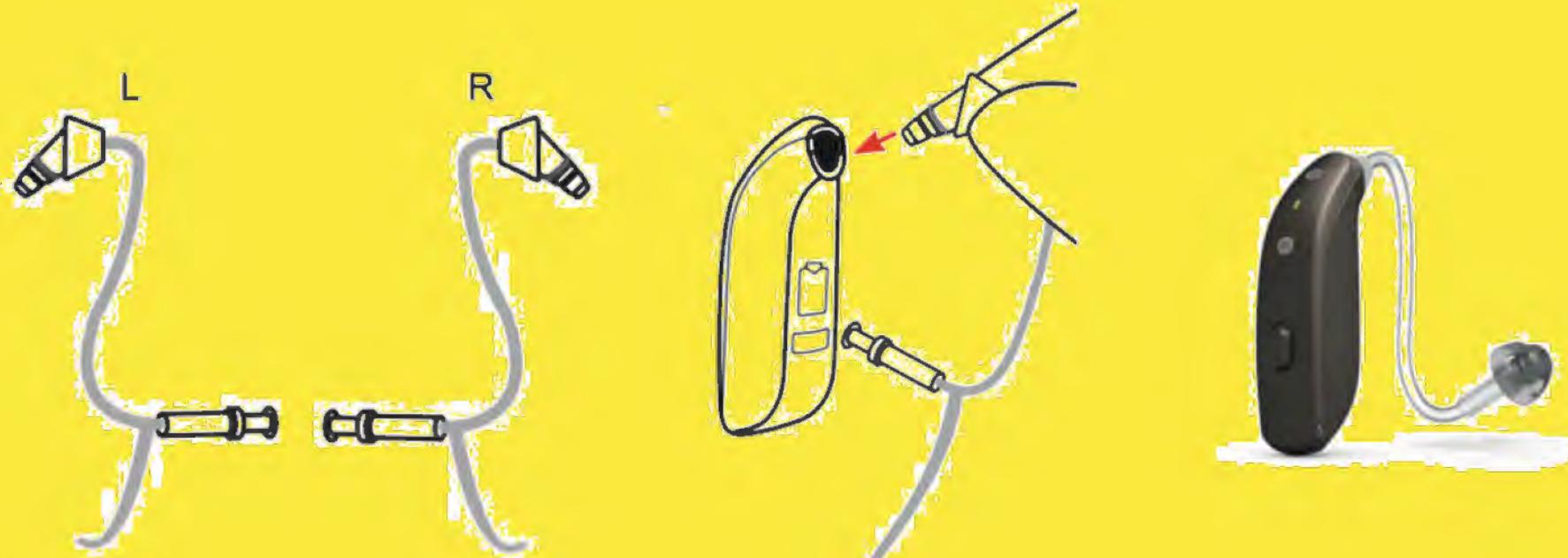



22035700

FILTER,MIC,CASE,8PCS

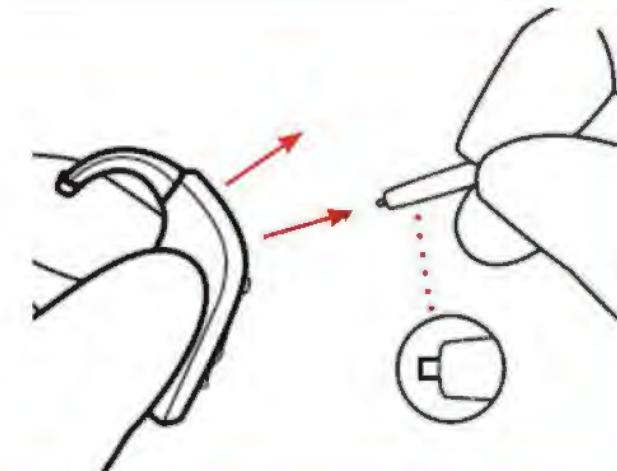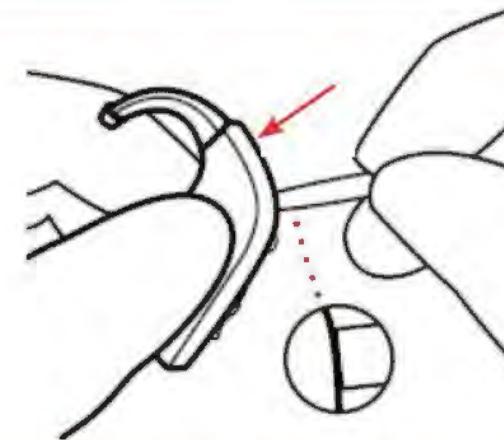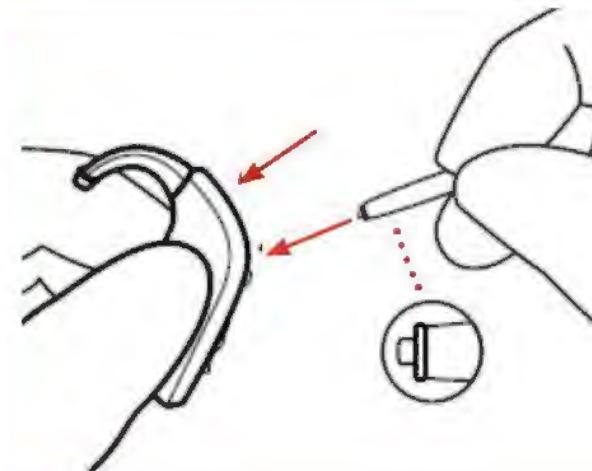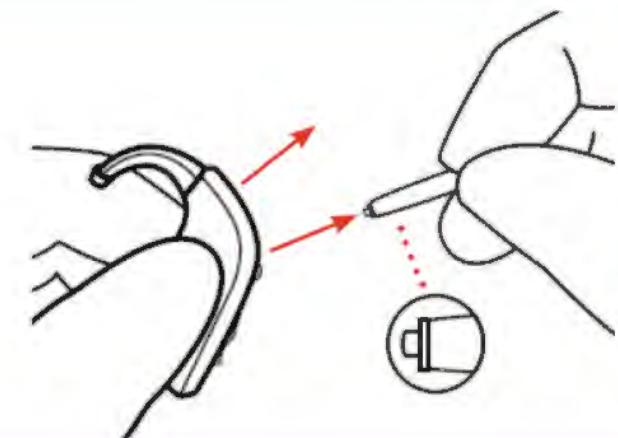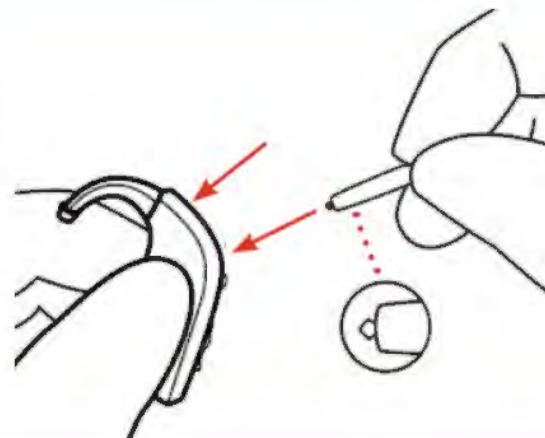



BTE: Cores



Champagne

Sparkling
Silver

Gold

Bronze

Warm
Grey

Espresso

Graphite

Deep
Black

O tamanho e o conforto importam

48%

das pessoas preferem uma solução personalizada depois do diagnóstico imediato de perda auditiva



Novo ITE recarregável



**Independentemente do que pensas
sobre os aparelhos auditivos a
medida, vais pensar de novo**

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
- Novo design de auriculares
- Experiencia de som e2e com todas as funções
- Recarregável e sem fios
- Bateria para todo o dia com uma só carga*
- À prova de intempéries com certificação IP68
- Se conecta a Bluetooth LE Audio e Auracast™



Interton GN










Tudo mudou

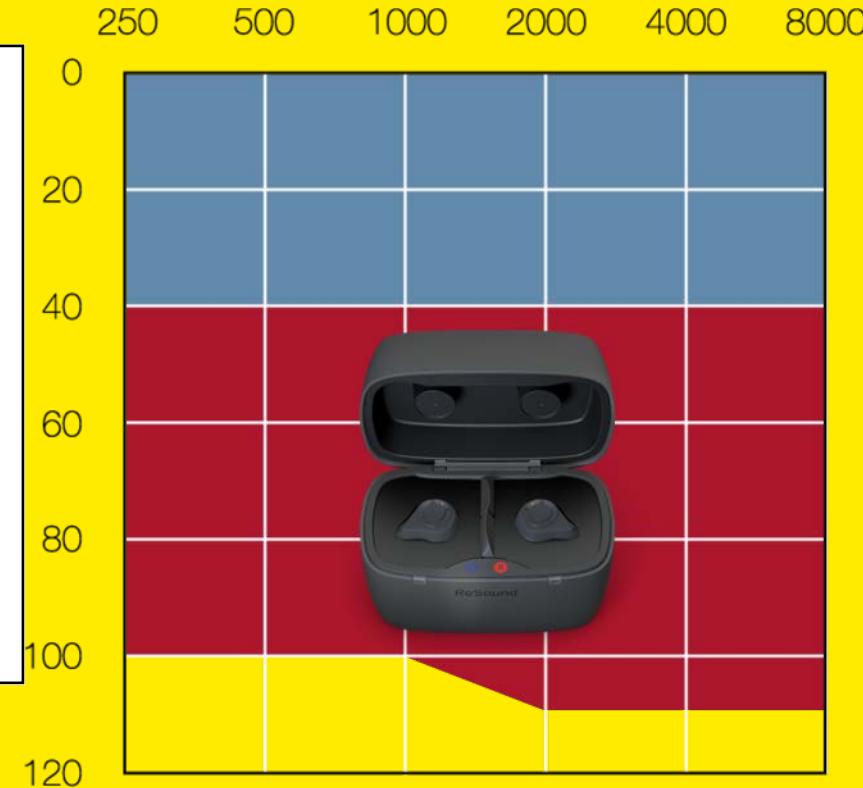

**Auriculares com
melhoria da audição**

*Ajuste universal para uso
ocasional*

Feito a medida

*Ajuste personalizado
para uso durante todo
o dia*

Para perdas auditivas de leves a severas



Interton GN

Cores

In-style™

Antracita

**Cor padrão por
defeito**

Blend-In™



Bege claro

Bege

Castanho
medio

Castanho

Castanh
o escuro



Uma experiencia totalmente personalizada

Interton GN






Projetado para não parecer com um aparelho auditivo

Interton GN

Faceplate Universal

Design de um só botão

Novo processo de design

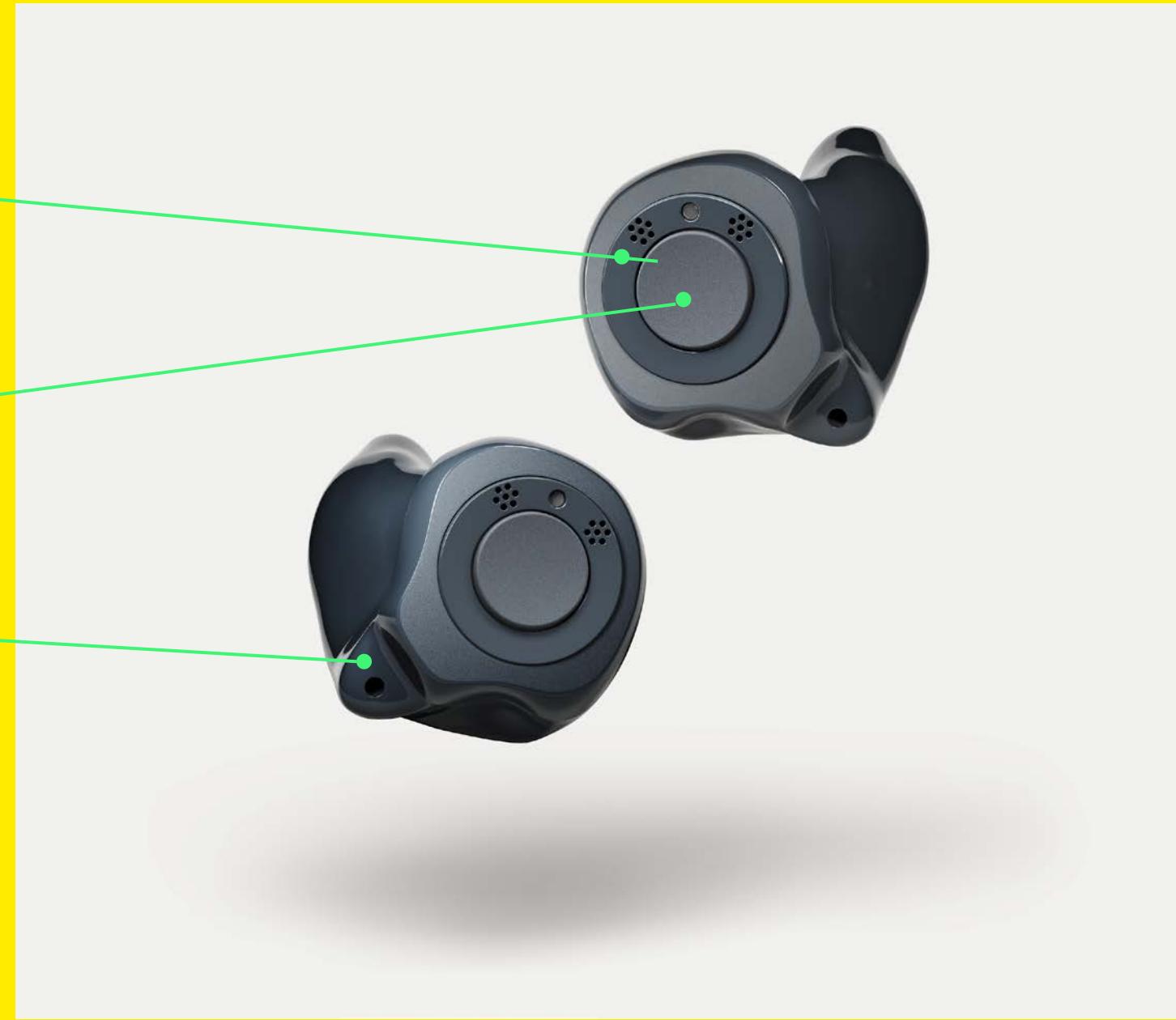



Entradas de som do microfone

Anéis de filtros



ITE recarregável
ITE-DWC-MP/HP/UP

Luz LED indicadora

Pulsador










O primeiro carregador personalizado do mundo


Interton GN



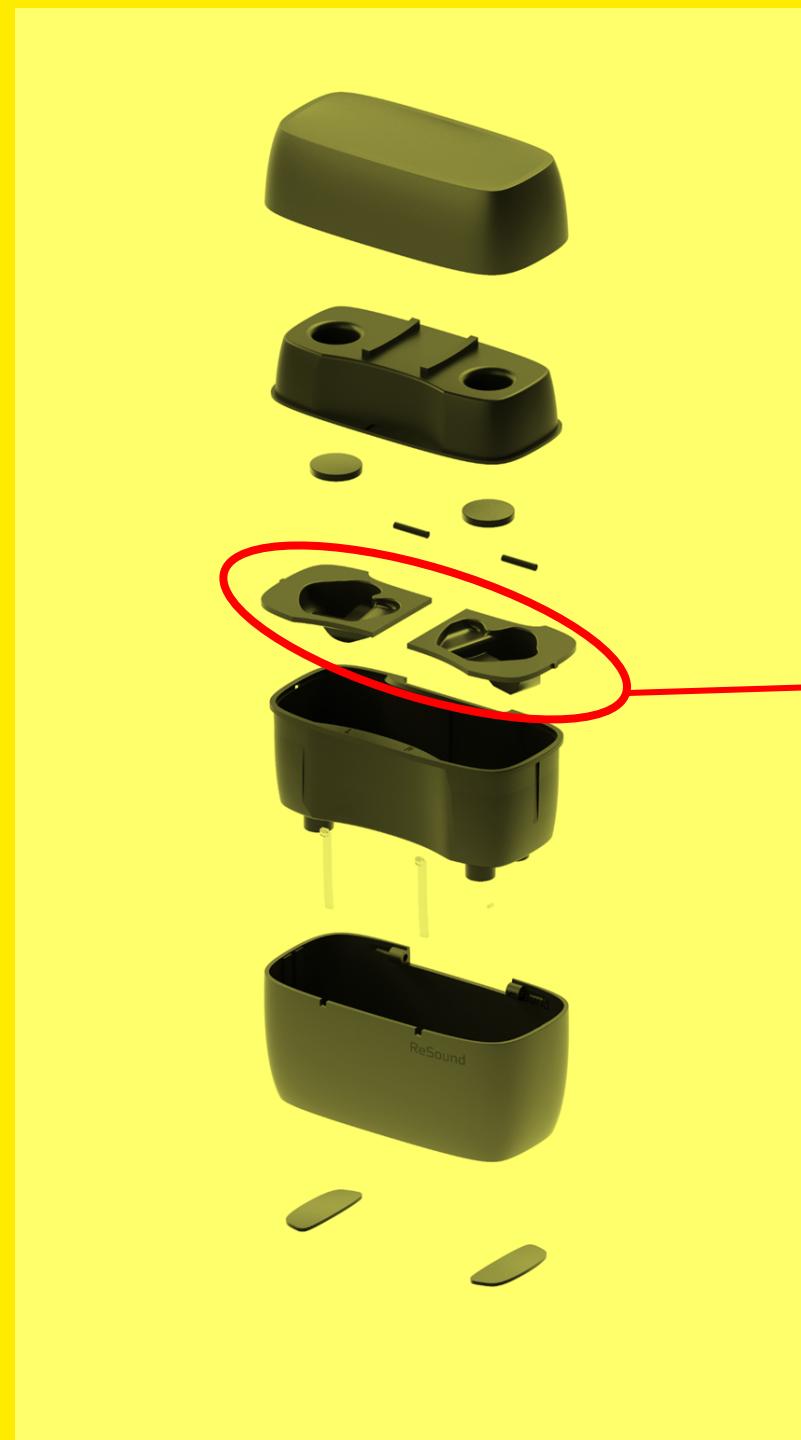

Fabricado e entregue com os aparelhos auditivos quando um novo pedido ou reajuste é feito.

1. Com o pedido de intras envia-se o carregador.
2. Se for binaural, as "inserções" do carregador serão feitas à medida. Se for monaural, uma das inserções será feita sob medida e a outra será padrão.
3. A cada reajuste, uma nova inserção reajustada deve ser enviada.

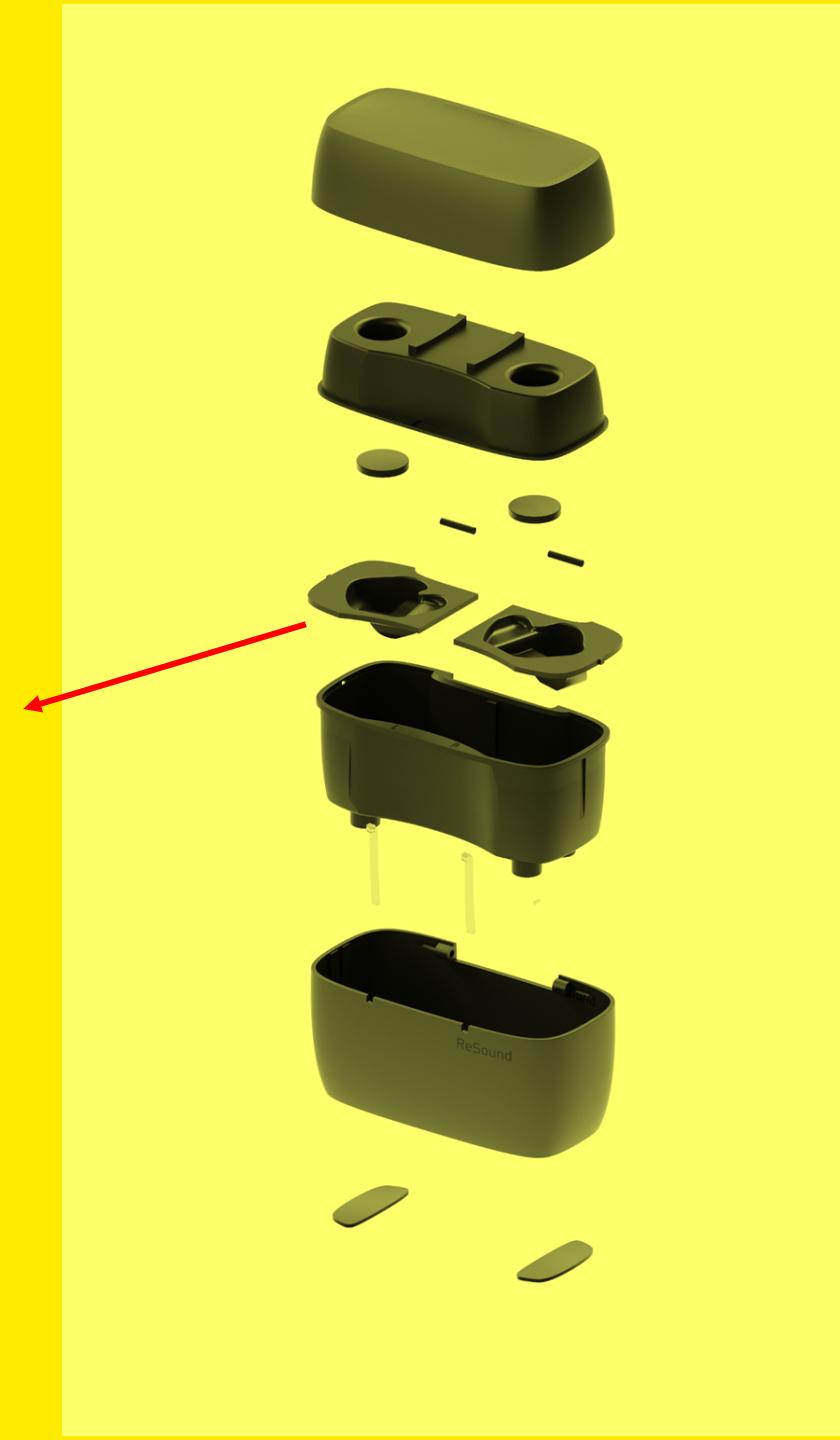

1. Se o cliente quiser um carregador adicional, este será processado como uma encomenda padrão e as pastilhas terão de ser fabricadas da mesma forma que as feitas para aparelhos auditivos.


ITC pila 312




- Habilitado para Auracast™
- Pila 312
- À prova de intempériesIP68



Direccionalidade adaptativa

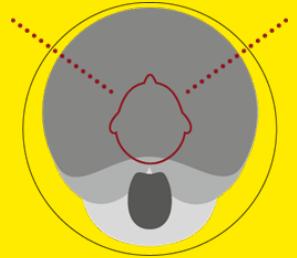

Dir. Automatizada

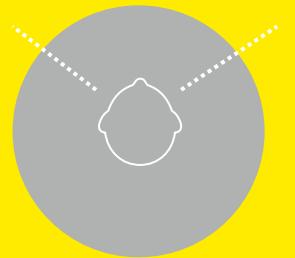

Nosso ITC de pilha 312 que se conecta ao Auracast

- Chip de plataforma C6, oferece melhor eficiência da pilha 312
- O design ITC não recarregável oferece uma opção WL ITC mais pequena

- Pilha 312

- **Funções presentes:**


- Direccionalidade focada na fala e automatizada.
- Conectividade 2,4 GHz com acessórios sem fios.
- Conectividade Bluetooth MFI e Android, LE Audio e Auracast.
- Sincronização ouvido a ouvido para as funções de volume e mudança de programa.

- **Funções não presentes:**

- Direccionalidade sincronizada (Binaural, Total ou Total 360).
- Front Focus o Ultra Focus.
- Alta voz com o telemóvel.



Intras Presto

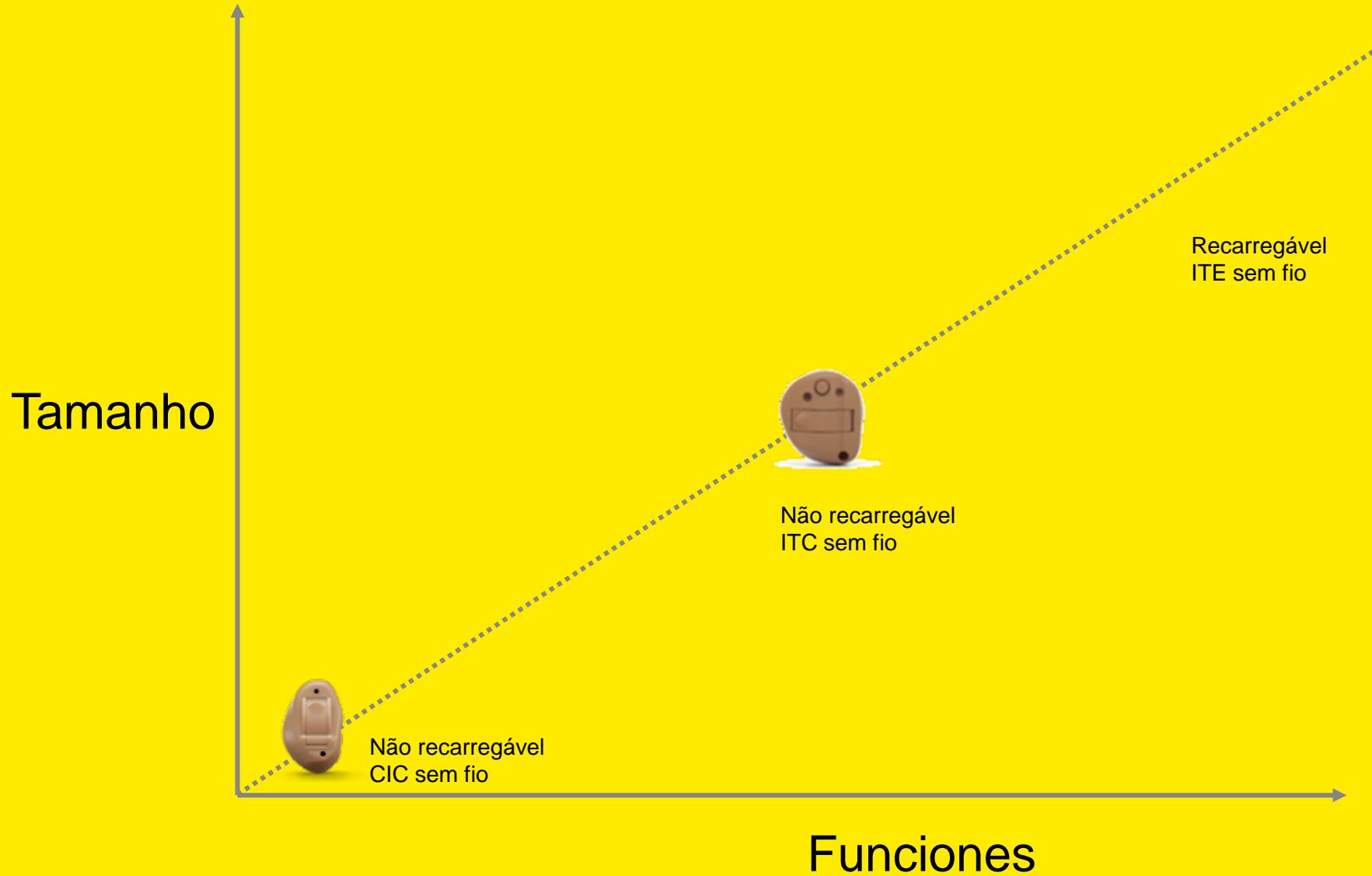

Opções de estilo – cores personalizadas






CIC

Para quem mais
valoriza a discrição





CIC

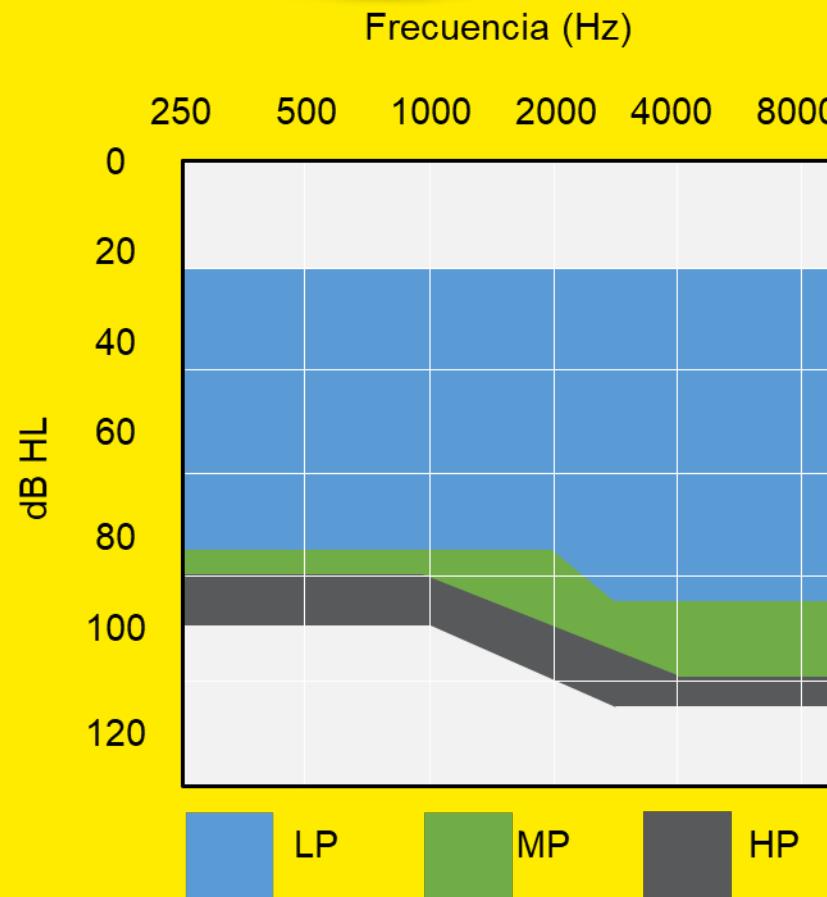

Interton GN

- O menor aparelho auditivo CIC da Interton
- 3 potencias: LP, MP y HP
- Mesma largura de banda estendida que o resto da família
- Pilha 10A
- Não sem fio



CIC: cores

Anthracita



Beige



Light
Beige



Brown



Medium
Brown



Dark
Brown



Energia durante todo o dia ou dia, mesmo durante o streaming



Interton Presto microRIE



12 hr

Ao transmitir áudio 100% do tempo



24 hr

Aproveite o tempo com uma única carga e mais três cargas no estojo premium

Carga ultrarrápida

Tempo de carregamento

3 hr  **24 hr (max)**

1 hr  **8 hr (dia hábil)**

10 min  **1.5 hr**


A photograph of a young woman hugging her mother from behind. Both are smiling warmly. The background is a solid, vibrant yellow.

Conecta de forma natural

Uma nova experiência de conectividade



A nova conectividade universal Bluetooth® LE Audio e AuracastTM permite o som mais nítido, a menor latência e o menor consumo de bateria para streaming durante todo o dia¹

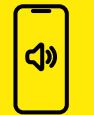

Novas chamadas mãos livres para iPhone, iPad** e outros dispositivos móveis com Bluetooth 5.3 ou posterior²



Ouça nas situações mais desafiadoras com o **novo TV-Streamer+ e Multi-Mic+3**



Novo software de ajuste 2.0 para um fluxo de trabalho eficiente e agradável




Novos reajustes remotos com Interton Remote Fitting e Remote Fitting Live

1. Bluetooth SIG; 2. As chamadas mãos livres são compatíveis com o iPhone 11 ou posterior, o iPad Pro de 12,9 polegadas (5.ª geração), O iPad Pro de 11 polegadas (3.ª geração), o iPad Air (4.ª geração), o iPad mini (6.ª geração), el iPad (10.ª geração) ou posterior, com atualizações de software iOS 15.3 e iPadOS 15.3 ou posterior. 3.Jespersen et al. (2023); Groth (2024)


**Feito para
Bluetooth LE Audio
e Auracast™**




Complexidade

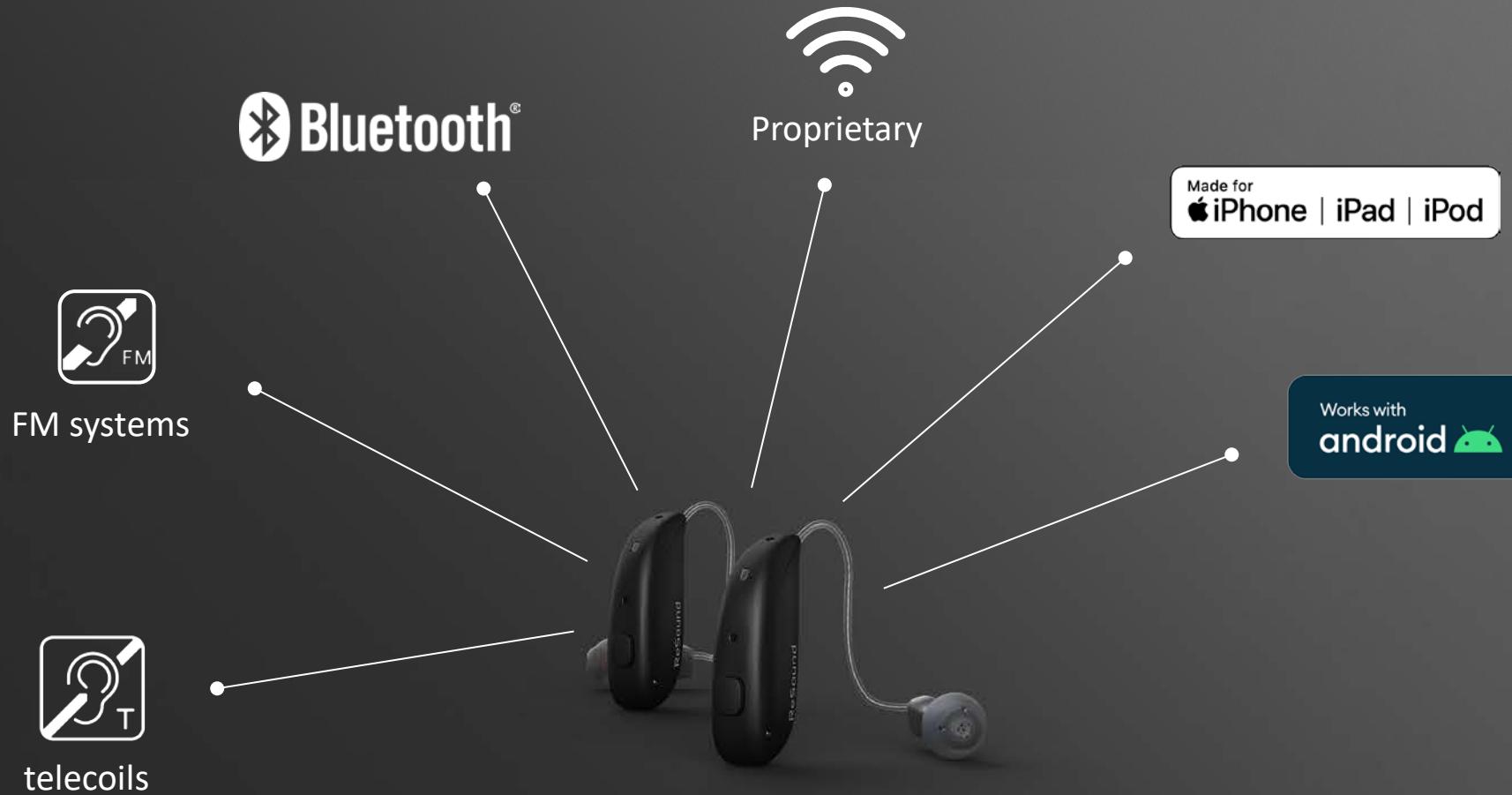


O cenário atual é complexo e limita o desenvolvimento de aplicações futuras

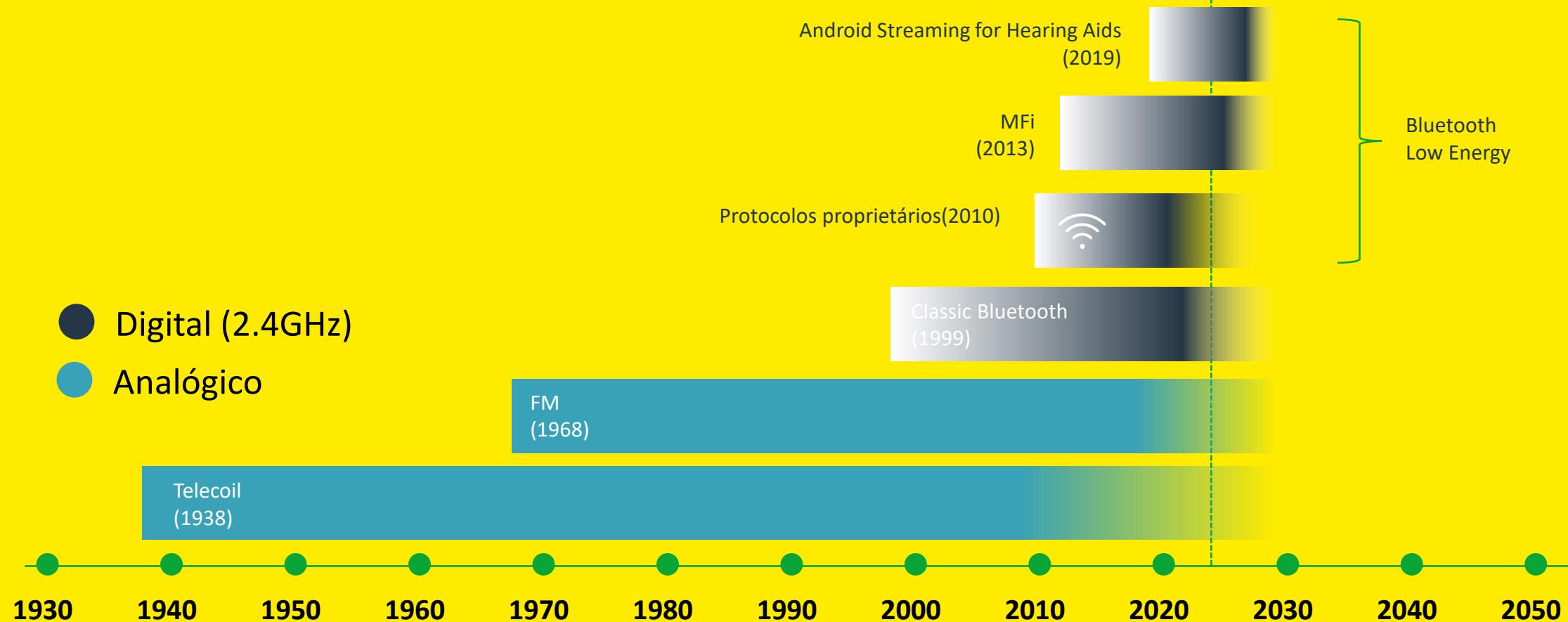

Uma nova era da comunicação acaba de começar

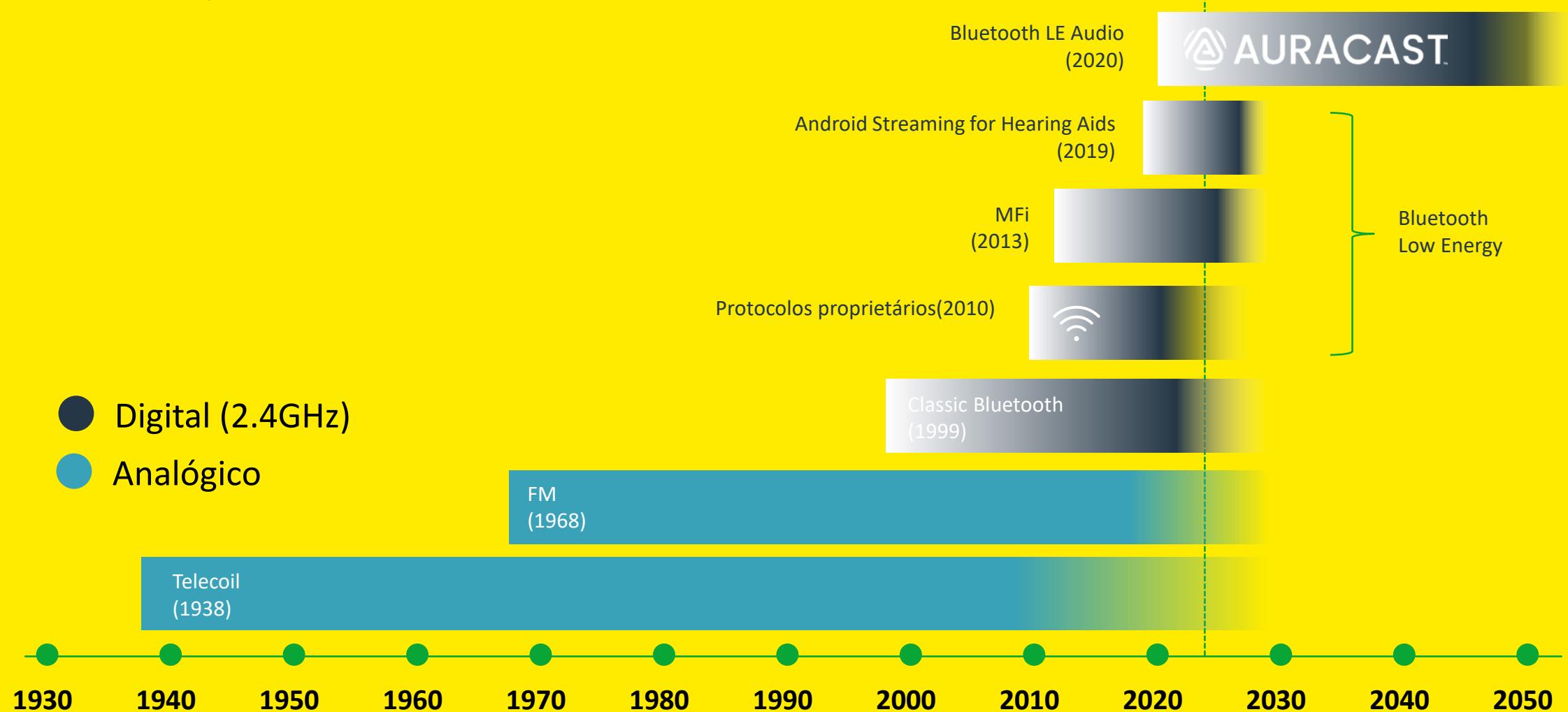

Conectar-se a qualquer coisa, em qualquer lugar

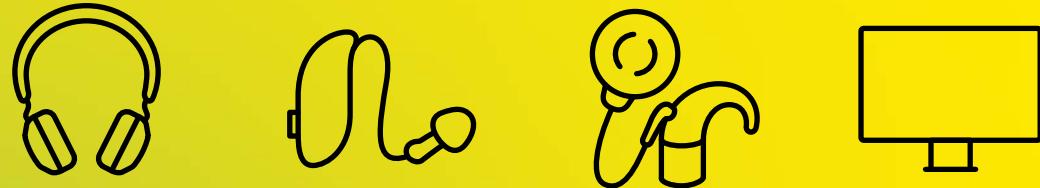

Bluetooth LE Audio

3 mil milhões

de dispositivos habilitados
para áudio Bluetooth LE
estimados anualmente em

2027



Galaxy Buds2 Pro




TV Neo QLED 8K



Benefícios de Bluetooth LE Audio



Maior qualidade de som,
menor potência

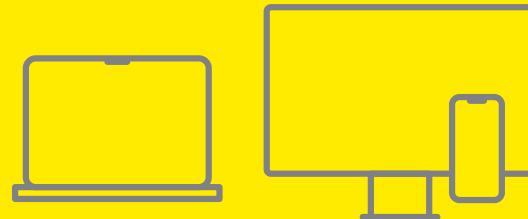

Chamadas mãos-
livres no
Android*

A comunicação bidirecional o
torna possível



Transmissão e
compartilhamento de
áudio

Em dispositivos eletrónicos
pessoais e locais públicos

Novo Bluetooth® Low Energy Audio e Auracast™



Cinemas



Televisões



Conferências





Dispositivos
eletrónicos



Transporte público




Aeroportos

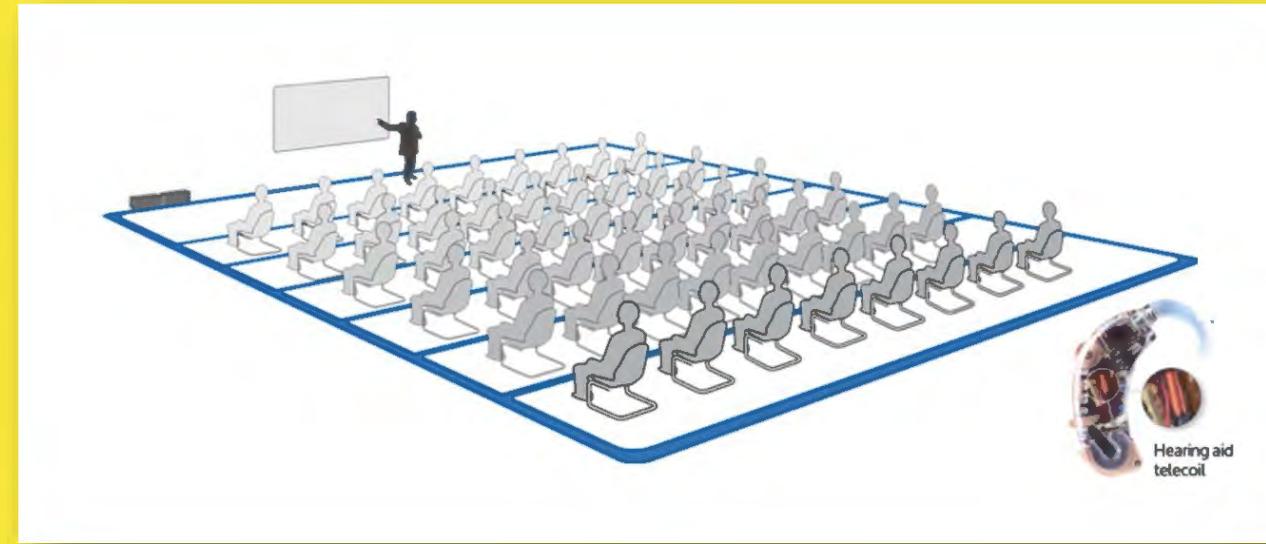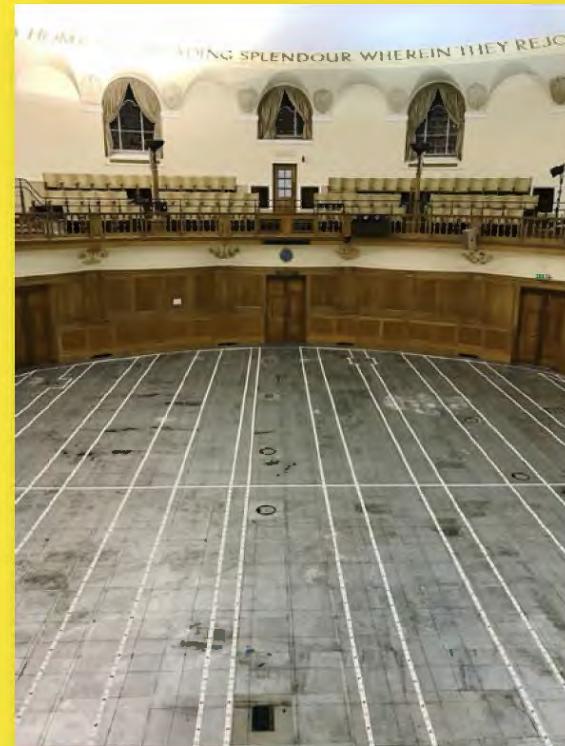

2.5 MILHÕES

De locais oferecerão
áudio Auracast em todo
o mundo até 2030

ABI Research, 2023

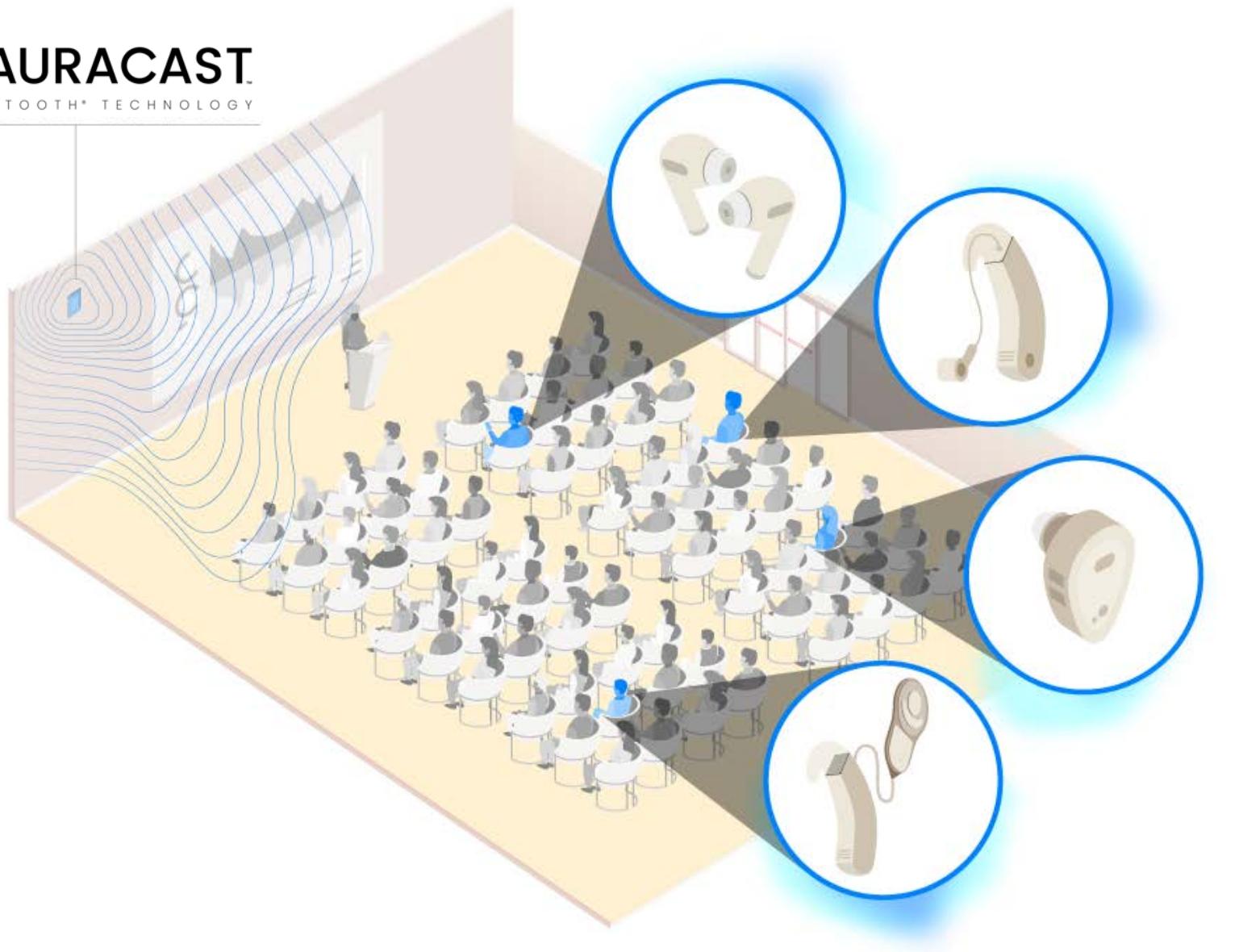




Como conectar ao Auracast?



3 formas de conectar-se a Auracast

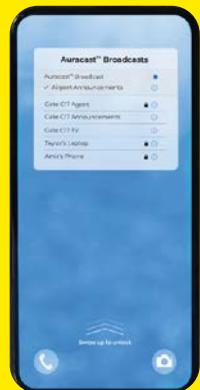

1 Com teu smartphone, como conectar-se ao WIFI




2 Digitalizando um código QR



3 Com o toque de um botão



Fácil de aderir a Auracast

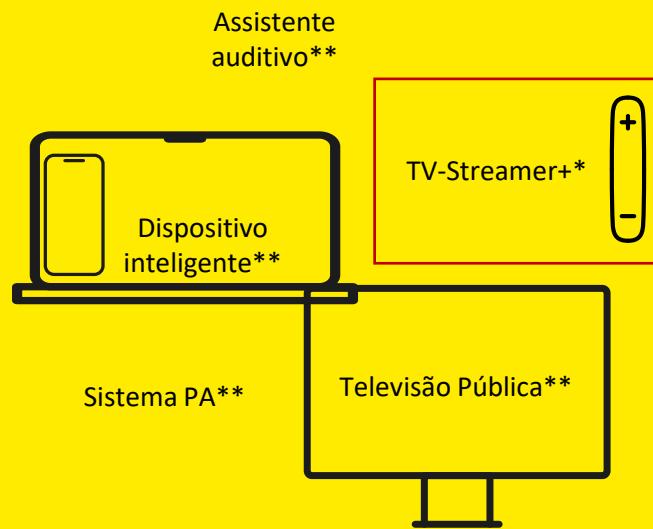

1 Transmissor
Auracast

2 Assistente de
Auracast

3 Recetor
Auracast

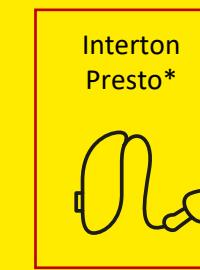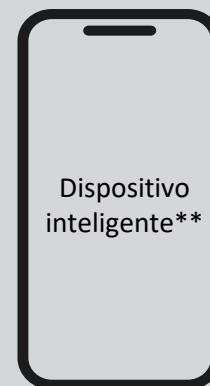

Funciona com Auracast

Novo TV-Streamer+





Funciona com Auracast

Novo Multi-Mic+

Ouvir conversas ou discursos sobre o ruído de fundo em lugares lotados.



Funciona com Auracast

Novo TV-Streamer+



TV-Streamer+ / MultiMic+

Interton GN

- Configuração fácil e intuitiva
 - **Emparelhamento carregando um botão** no dispositivo (Não é necessário reiniciar o aparelho auditivo).
- Conexão simples
 - **Novas configurações disponíveis na aplicação**
 - **Carregamento com USB-C**
 - **Atualização remota do firmware** através da aplicação ou do Smartfit
- Novo design para facilitar o uso
 - **Funcionalidade simples e intuitiva**
 - **Capa frontal atualizada:** Proporciona uma pegada confortável e uma superfície sem impressões digitais
- Conectados para novas experiências sonoras
 - **Com tecnologia Bluetooth® LE Audio y AuracastTM**
 - O áudio será "misturado" com o áudio no programa selecionado
 - Admite áudio de transmissão Auracast™,





MultiMic+

Interton GN

Entrada de microfone



Capa superior
atualizada(sem
marcas)

Entrada
de línea
Conector FM



USB-C
para carga



Botão de
encendido

Indicador
luminoso de
estado
(LED: verde,
azul, branco)

Entrada de micrófono



Clip de suporte

Botão de emparelhamento

Botão de modo

Indicadores
luminosos de modo e
estado de la batería
(LEDs)

Aumentar o volume
Diminuir o volume

Battery charging status

- 100% : 4 green static LEDs
- 99-75%: 4 green LEDs (Top one pulsing)
- 74-50%: 3 green LEDs (Top one pulsing)
- 49-25%: 2 green LEDs (Top one pulsing)
- <25%: 1 green pulsing LED



100%	99-75%	74-50%	49-25%	<25%
●●●●	●●●●			
●●●●	●●●●	●●●●		
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

Battery level status

Press & hold the mode button for >1 second

- >75%: 4 green LEDs shown
- 50%-74%: 3 green LEDs shown
- 25%-49%: 2 green LEDs shown
- <25%: 1 green LED shown

Stops when button is released.



>75%	74-50%	49-25%	<25%
●●●●	●●●●		
●●●●	●●●●	●●●●	
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

TV-Streamer+
Multimic+

Interton GN



Compatibilidade

	TV-Streamer+ Multimic+	Acessórios anteriores
Interton Presto		
Interton Move y Anteriores		

Três novas sequencias de emparelhamento

1

Emparelhamento de aparelhos auditivos com TV-Streamer+ / Multimic+



2

Emparelhamento de Aparelhos auditivos com o telemóvel



3


Emparelhamento de TV-Streamer+ com a aplicação Interton Sound





Auracast transformará os dispositivos de assistência auditiva

Interton GN

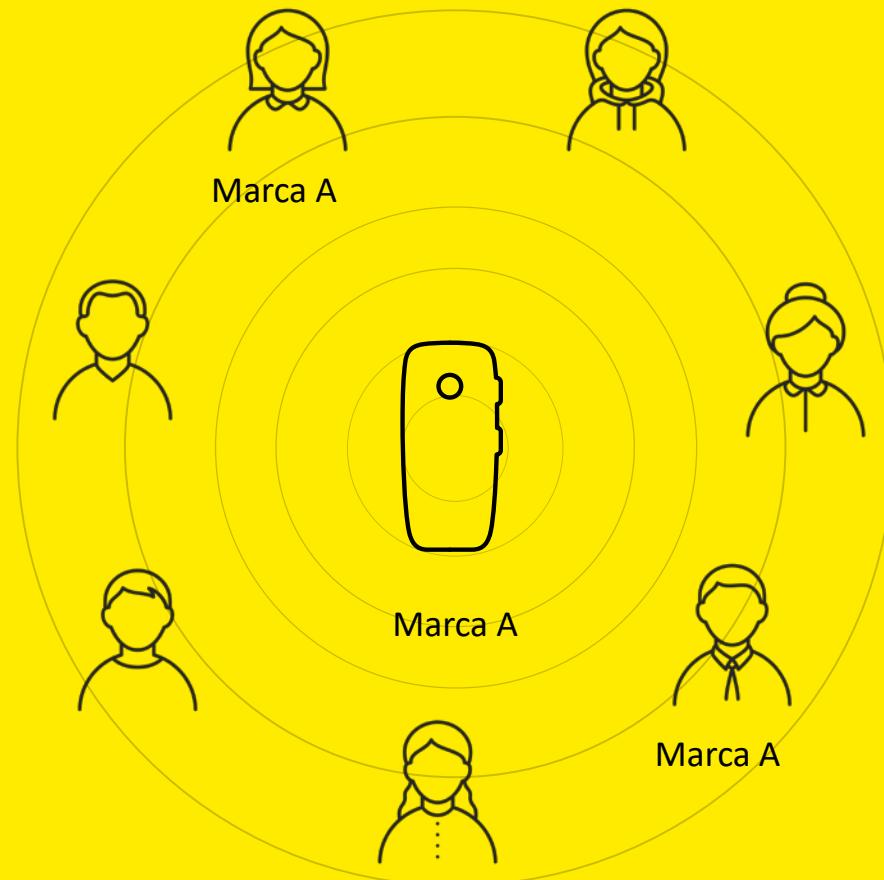

Tecnologia tradicional




Auracast



Auracast transformará os dispositivos de assistência auditiva

Interton GN

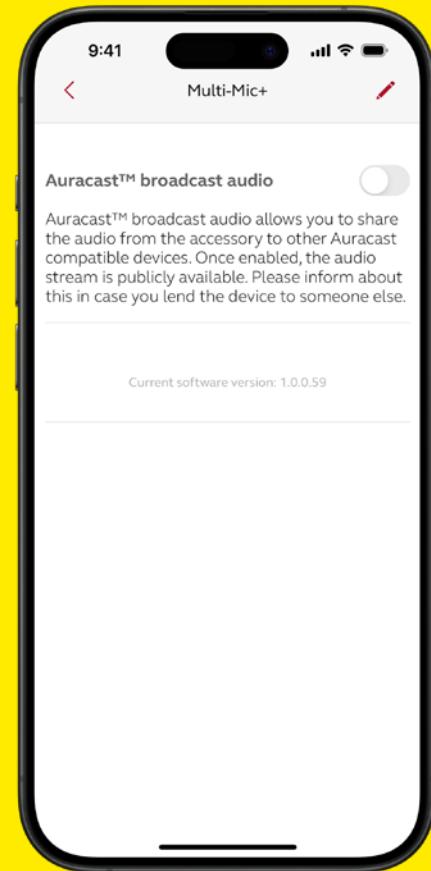

Interton Sound™ app






Quantos dispositivos podem ser emparelhados com o Interton Presto?

Interton GN

Dispositivos eletrónicos

A través de Bluetooth LE Audio, MFi y ASHA

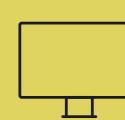

Dispositivos eletrónicos

TV-Streamer+

Multi-Mic+

Até 8 dispositivos

TV Streamer/Multi-mic

Geração anterior de acessórios sem fios

Até 3 no total

Phone Clip

Conecta-se a telefones com Bluetooth® clássico



1 unidade

Remote Control




1 unidade

Interton Fitting 2.1 Update 2

Teu software de adaptação

Interton Fitting 2.1 Update 2

Um fluxo de trabalho eficiente

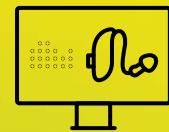

Nova página de início, mais limpa,
moderna e intuitiva



Acesso rápido a funções sem abrir uma
sessão de ajuste



Acesso rápido a links de interesse



Noah 4.12 ou superior necessário.




Suporte remoto personalizado

Reajustes remotos síncronos e assíncronos com




Interton Remote Fitting

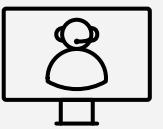

Interton Remote Fitting Live

Verifique se os aparelhos auditivos são usados corretamente com

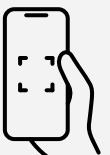

Check My Fit



Grandes coisas vêm com embalagens 100% recicláveis

47% 100%

Menos de
emissões
CO2*

Reciclável



Certificação FSC, para
garantir que o papel e o
papel cartão sejam
obtidos de maneira
responsável





Comparação de nível tecnológico

Características


																						
Colores	 Anthracite	 Light Beige	 Beige	 Medium Brown	 Brown	 Light Beige	 Sparkling Silver	 Champagne	 Gold	 Bronze	 Warm Grey	 Graphite	 Espresso	 Deep Black	 Sparkling Silver	 Champagne	 Gold	 Bronze	 Warm Grey	 Graphite	 Espresso	 Deep Black
Bateria	10A	312	Recarregável	Recarregável	312	13	Recarregável	Recarregável														
Transmissão MFi/Android	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓														
Acessórios sem fio	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓														
Telecoil	(✓)	(✓)				✓	✓	✓														
LED				✓			✓	✓														
Control	Pulsador Prog.	Pulsador Prog.		Pulsador Prog.	Pulsador Prog.	Botão multifunções	Botão de pressão e botão basculante	Botão de pressão e botão basculante														
Entrada direta de áudio							✓	✓														
Transmissor CROS / BiCROS				✓			✓															

Descrição geral do carregador

			Duração da bateria	Duração da bateria ao transmitir
RIE	 microRIE 60S-DRWC	 Premium	 De escritório	Típico 24h hasta 20h*
BTE	 BTE 77-DWC	 Power BTE 88-DWC	 De escritório	Típico 24h hasta 20h*
ITE	 ITE-DWC	 Personalizado		Típico 24h hasta 20h*

Soa natural

Interton GN

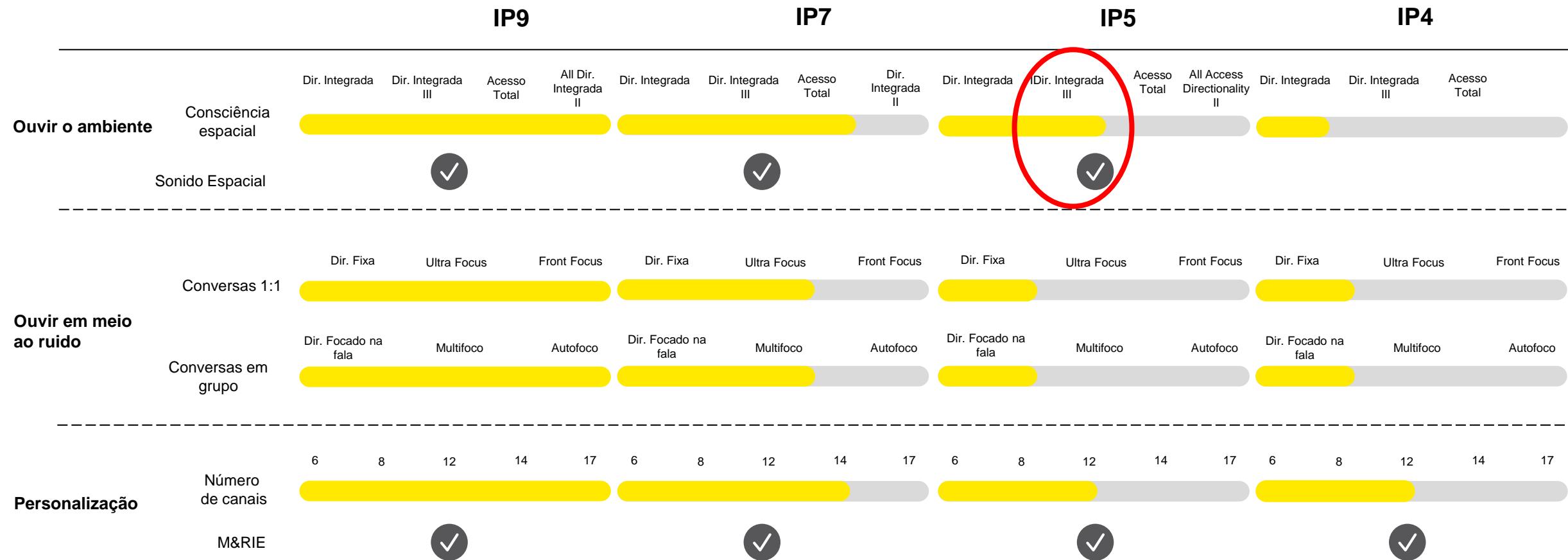

Sente-se natural

Interton GN

	IP9	IP7	IP5	IP4	
Comodidade	On/off Redução do ruído ambiental	2 ajustes 3 ajustes 5 ajustes On/off	2 ajustes 3 ajustes 5 ajustes On/off	2 ajustes 3 ajustes 5 ajustes On/off	2 ajustes 3 ajustes 5 ajustes On/off
	On/off Redução do ruído do vento	2 ajustes 3 ajustes On/off	2 ajustes 3 ajustes On/off	2 ajustes 3 ajustes On/off	2 ajustes 3 ajustes On/off
	On/off Redução de ruído repentino	2 ajustes 3 ajustes On/off	2 ajustes 3 ajustes On/off	2 ajustes 3 ajustes On/off	2 ajustes 3 ajustes On/off
	Auto DFS Cancelamento do Feedback	DFS Ultra III	Auto DFS DFS Ultra III	Auto DFS DFS Ultra III	Auto DFS DFS Ultra III
Melhora da fala	Adaptação do volume Ganho por ambientes	Red. Ruido Personalizado	Adaptação do volume Red. Ruido Personalizado	Adaptação do volume Red. Ruido Personalizado	Adaptação do volume Red. Ruido Personalizado
	Compreensão de frequência	✓	✓	✓	✓
	CROS/BiCROS	✓	✓	✓	✓
Fiabilidade e facilidade de utilização	IP rating TapControl	IP68 ✓ *microRIE	IP68 ✓ *microRIE	IP68 ✓ *microRIE	IP68 ✓ *microRIE
	Gerador de Som Tinnitus	✓	✓	✓	✓

Se conecta de forma natural

Interton GN

		IP9	IP7	IP5	IP4
	Personalização	Padrão 	Melhora do Som 	Padrão 	Melhora do Som
Interton Sound app	Check My Fit	✓	✓	✓	✓
	Reajustes remotos	✓	✓	✓	✓
Conexão direta com o smartphone	Bluetooth LE Audio	✓	✓	✓	✓
	Made for iPhone	✓	✓	✓	✓
	Chamadas mãos-livres para iPhone e iPad	✓	✓	✓	✓
	Transmissão de Android para aparelhos auditivos	✓	✓	✓	✓
Ver a Televisão	TV-Streamer+ com Bluetooth LE Audio	✓	✓	✓	✓
	TV Streamer 2	✓	✓	✓	✓
Microfone remoto	Multi-Mic+	✓	✓	✓	✓
	Multi-mic/Micro-mic	✓	✓	✓	✓
Comando remoto	Comando remoto	✓	✓	✓	✓

Obrigado

